

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/aparat-korygujacy-koslawe-ustawienie-palucha-hallux-corectus-p-10198.html>

Aparat korygujący koślawe ustawienie palucha Hallux corectus



Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	050440
Producent	Kaps

Opis produktu

Aparat korygujący koślawe ustawienie palucha. Aparat należy stosować w czasie snu lub wypoczynku, najlepiej w pozycji leżącej.

SPOSÓB APLIKACJI:

Wsunąć aparat na pierwszy palec i zamocować stabilnie za pomocą paska z rzepem. Element konstrukcyjny powinien znajdować się pomiędzy paluchem i drugim palcem. Ortezę należy myć w letniej wodzie z dodatkiem neutralnego mydła i suszyć w temperaturze pokojowej z daleka od sztucznych źródeł ciepła. Przed podjęciem decyzji o zakupie aparatu należy go przymierzyć i sprawdzić czy pasuje do stopy. Jeżeli pojawiły się jakieś niepożądane działania (np. ból) to należy zaprzestać użytkowania aparatu i skonsultować się z lekarzem. Nie wolno użytkować aparatu w czasie chodzenia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S , M , L