

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/elastyczny-stabilizator-nadgarstka-pt0311-p-6547.html>



## Elastyczny stabilizator nadgarstka PT0311

Cena	<b>60,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PT0311</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- zabezpiecza przed kontuzjami stawu podczas uprawiania sportu (tenis, golf, narty, snowboard) lub w czasie wzmożonego wysiłku
- wzmacnia staw nadgarstka oraz staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka
- przyspiesza leczenie urazów i zwyrodnień
- łagodzi bóle
- zabezpiecza staw (np. podczas pracy przy komputerze)

Stabilizator wykonany jest z dzianiny elastycznej, wzmacniającej i ogrzewającej staw.

#### Instrukcja używania:

##### Dopasowanie rozmiaru:

- Wyrób produkowany jest w rozmiarze uniwersalnym.
- Zapięcie na rzep umożliwia indywidualne dopasowanie.

##### Sposób zakładania:

Odpiąć rzep. Kciuk umieścić w otworze opaski, a następnie (zaczynając od wierzchniej strony dłoni) zawinąć opaskę wokół stawu nadgarstka i zapiąć rzep.

##### Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

##### Przepis prania:

---

Przed praniem zapiąć rzep w celu uniknięcia pohaczenia.

**Uwagi:**

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- O czasie stosowania wyrobu decyduje lekarz.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem. Ciągłe stosowanie wyrobu, bez wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie, może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować wyrobu na uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.
- Nie stosować wyrobu jeżeli wcześniej użyto np. maści, żeli, kremów rozgrzewających.
- Wyrób zapięty zbyt ciasno może pogorszyć krążenie krwi.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.