

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/gorset-stabilizujacy-ledzwiowo-krzyzowy-262-pt0236-p-6527.html>



Gorset stabilizujący lędźwiowo - krzyżowy „26/2” PT0236

Cena	200,00 zł
Numer katalogowy	PT0236
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

Wskazania / Zastosowanie:

- zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
- dyskopatia odcinka lędźwiowo-krzyżowego
- kręgoszyk niewielkiego stopnia
- zmiany zwyrodnieniowe
- doleczenie po zabiegach ortopedycznych
- złamania wyrostków kolczastych i poprzecznych
- stabilizacja odcinka lędźwiowo-krzyżowego po operacjach
- wzmocnienie mięśni, poprawa ukrwienia, utrzymanie temperatury
- profilaktyka przeciążeń kręgosłupa zwłaszcza w pozycji wymuszonej

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu miejsca wskazanego w tabeli, a następnie wybrać rozmiar.

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód brzucha	71 - 80	81 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121 - 130	131 - 140

w najszerszym
miejscu [cm]

Produkty w rozmiarze XS oraz XXXL są dostępne na zamówienie, z wydłużonym okresem oczekiwania

Sposób zakładania:

- Odpiąć rzepy.
- Gorset założyć, obejmując odcinek lędźwiowo-krzyżowy tak, aby zapięcie na rzep przypadło z przodu.

-
- Gorset zapinąć z przodu na rzepy, a następnie zapinąć taśmy dociągające, regulując indywidualnie dopasowanie.
 - Niewskazane jest regulowanie wysokości wyrobu poprzez naciąganie go w górę lub w dół po zapięciu rzepów, gdyż może to spowodować rozdarcie dzianiny. Jeśli skorygowanie wysokości jest konieczne, należy najpierw rozpiąć rzepy, a następnie ustawić wyrób w odpowiedniej pozycji i ponownie je zapinąć.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Przed praniem wyjąć stalki z gorsetu oraz zapinąć rzepy w celu uniknięcia zahaczenia wyrobu.

Uwagi:

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować wyrobu na rany, chorobowo zmienioną lub uszkodzoną skórę.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem.

Wyrób jest zapinany na rzepy.

Wysokość wyrobu 26 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: szary , Cielisty

Rozmiar: XS , S , M , L , XL , XXL , XXXL