

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/gorset-stabilizujacy-ledzwiowo-krzyzowy-263-pt0237-p-6528.html>



## Gorset stabilizujący lędźwiowo - krzyżowy „26/3” PT0237

Cena	<b>230,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PT0237</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### Wskazania / Zastosowanie:

- zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
- dyskopatia odcinka lędźwiowo-krzyżowego
- kręgozmyk niewielkiego stopnia
- zmiany zwyrodnieniowe
- doleczenie po zabiegach ortopedycznych
- złamania wyrostków kolczastych i poprzecznych
- stabilizacja odcinka lędźwiowo-krzyżowego po operacjach
- wzmocnienie mięśni, poprawa ukrwienia, utrzymanie temperatury
- profilaktyka przeciążeń kręgosłupa zwłaszcza w pozycji wymuszonej

### INSTRUKCJA UŻYWANIA

#### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu miejsca wskazanego w tabeli, a następnie wybrać rozmiar.

#### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód brzucha	71 – 80	81 – 90	91 – 100	101 – 110	111 – 120	121 – 130	131 – 140

w najszerszym  
miejscu [cm]

Produkty w rozmiarze XS oraz XXXL są dostępne na zamówienie, z wydłużonym okresem oczekiwania

#### Sposób zakładania:

- Odpiąć rzepy.
- Gorset założyć, obejmując odcinek lędźwiowo-krzyżowy tak, aby zapięcie na rzep przypadło z przodu.
- Gorset zapiąć z przodu na rzepy, a następnie zapiąć górne i dolne taśmy dociągające, regulując indywidualnie dopasowanie.

- 
- Niewskazane jest regulowanie wysokości wyrobu poprzez naciąganie go w górę lub w dół po zapięciu rzepów, gdyż może to spowodować rozdarcie dzianiny.
  - Jeśli skorygowanie wysokości jest konieczne, należy najpierw rozpiąć rzepy, a następnie ustawić wyrób w odpowiedniej pozycji i ponownie je zapiąć.

**Przechowywanie:**

W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

**Przepis prania:**

Przed praniem wyjąć stalki z gorsetu oraz zapiąć rzepy w celu uniknięcia zahaczenia wyrobu.

**Uwagi:**

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować wyrobu na rany, chorobowo zmienioną lub uszkodzoną skórę.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem.
- Wyrób jest zapinany na rzepy.
- Wysokość wyrobu 26 cm.

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Kolor:** szary , Cielisty

**Rozmiar:** XS , S , M , L , XL , XXL , XXXL