

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/inhalator-siateczkowy-do-nebulizacji-p-15719.html>



Inhalator siateczkowy do nebulizacji

Cena	180,00 zł
------	------------------

Numer katalogowy	M102
------------------	-------------

Producent	Timago
-----------	---------------

Opis produktu

Inhalator siateczkowy do nebulizacji Timago - wibrująca membrana przepycha płynny lek przez mikrometrowe otworki (siateczka - ang. mesh), zamieniając go tym samym w aerozol o bardzo precyzyjnym rozmiarze pojedynczych kropelek. Nebulizator membranowy to najnowocześniejszy typ nebulizatora, który nadaje się do podawania wszystkich rodzajów leków przeznaczonych do nebulizacji. Nebulizator membranowy jest bardzo wydajny i precyzyjny. W pełni wykorzystuje zaaplikowaną do inhalatora dawkę leku, co oznacza, że resztki leku nie pozostają w nebulizatorze po zakończeniu inhalacji. Umożliwia prowadzenie zabiegu w pozycji leżącej, co w połączeniu z bezgłośną pracą pozwala na inhalację małego dziecka nawet podczas snu.

Zalety:

- ultra cichy - $\leq 50\text{dB}$;
- do stosowania z prawie wszystkimi lekami do nebulizacji;
- zapewnia optymalne wykorzystanie leku;
- wykonany w innowacyjnej technologii Mesh;
- kieszonkowy rozmiar;
- średnia wielkość cząsteczki w aerozolu - $3,7\text{ }\mu\text{m}$
- szybkość nebulizacji: $0,20\text{ ml/min}$
- bardzo lekki - tylko 108g
- działa na baterie ($2 \times \text{"AA" } 1.5\text{V}$)
- gwarancja na membranę: 6 miesięcy;
- gwarancja na urządzenie: 1 rok.

Z czego wykonana jest siateczka w nebulizatorze?

Siateczka (mesh) na którą oddziałuje wibrująca membrana jest wykonana ze stali nierdzewnej.

Co zawiera zestaw?

- pokrowiec, kabel zasilający z portem USB typ A, ustnik i 2 maski do inhalacji w zestawie (dla dorosłych i dla dzieci).

Uprzejmie informujemy, iż nebulizatory siateczkowe / membranowe są urządzeniami wrażliwymi na stosowanie w nebulizacji niektórych leków.

NIE MOŻNA W NICH STOSOWAĆ LEKÓW:

- ZAWIERAJĄCYCH KWAS HIALURONOWY
- SOLI HIPERTONICZNEJ (dopuszczalny jest roztwór NaCl 0,9%)
- SOLANEK
- OLEJKÓW ETERYCZNYCH
- SUBSTANCJI OLEISTYCH

W CELU POPRAWNEGO DZIAŁANIA NALEŻY RÓWNIEŻ PŁUKAĆ POJEMNIK LEKKO CIEPŁĄ, PRZEGOTOWANĄ WODĄ - PO KAŻDYM UŻYCIU. NASTĘPNIE POZOSTAWIĆ DO WYSCHNIĘCIA. NIE WOLNO DOTYKAĆ, PRZECIERAĆ MEMBRANY.

Dane techniczne

Rozmiar cząsteczki - MMD 3,7 µm

Szybkość nebulizacji > 0,2 ml/min

Zalecana objętość leku - maksymalnie 8 ml - minimalnie 2 ml

Wykrywanie braku leku w pojemniku

Poziom hałasu: ≤ 50dB

Wymiary: długość 67 mm x szerokość 48 mm x wysokość 125 mm

Waga: Około 108 g (z wyłączeniem baterii)

Zasilanie: baterie alkaliczne 2 x AA 1,5V lub zasilacz: 3 V DC

Częstotliwość wibracji: około 113 kHz

Warunki użytkowania: 5 ~ 40 °C, 15 ~ 93% wilgotność;

Warunki przechowywania: -40 ~ + 55 °C, 10 ~ 93% wilgotność;

Zawartość opakowania:

- Maska dla dorosłych;
- Maski dla dzieci;
- Głowica rozpylająca z pojemnikiem na lek;
- Ustnik;
- Kabel zasilający;
- Baterie alkaliczne x2;
- Etui;
- Instrukcja użycia.