

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/kamizelka-ortopedyczna-obojczykowo-barkowa-pt0222-p-6488.html>



## Kamizelka ortopedyczna obojczykowo - barkowa PT0222

Cena	<b>150,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PT0222</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- leczenie, doleczenie urazów i kontuzji stawu barkowego, ramiennego, ramienno-obojczykowego i łokciowego (w tym zwichnięcia, urazy tkanek miękkich tułowia)
- po urazach struktur kostnych obręczy piersiowej i kończyny górnej
- w ostrych zespołach bólowych w stawie barkowym
- w stanach zapalnych i zmianach zwyrodnieniowych stawu barkowego, obręczy piersiowej i kończyny górnej wymagających unieruchomienia i odciążenia
- po zabiegach operacyjnych ortopedycznych, neurochirurgicznych
- podczas rehabilitacji pooperacyjnej, pourazowej
- w leczeniu zmian reumatologicznych, neurologicznych
- w konieczności podtrzymania i częściowego unieruchomienia kończyny górnej, jako stabilizator, np. po zdjęciu unieruchomienia gipsowego
- kamizelka ustala ramię w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej w stawie ramienno-ramiennym (panewkowo-ramiennym), natomiast staw łokciowy i przedramię ustala blisko tułowia (możliwość regulacji zgięcia w stawie łokciowym w zakresie 90°-120°)
- zastosowany w konstrukcji wyrobu materiał o charakterze samoszczepnym daje duże możliwości regulacyjne

#### PRZECIWSKAZANIA:

- nie stosować w przypadku złamań lub zwichnięć stawu barkowego, które wymagają stabilniejszego zabezpieczenia np. w formie opatrunku gipsowego

#### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	XXL
Obwód klatki piersiowej [cm]	50 - 60	61 - 70	71 - 80	81 - 90	91 - 110	111 - 130

#### Instrukcja używania:

---

### **Dopasowanie rozmiaru:**

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu klatki piersiowej, a następnie wybrać rozmiar z tabeli.

**Uwaga! Nie stosować bezpośrednio na rany, otarcia naskórka, uszkodzoną skórę oraz w przypadku egzemy lub alergii skórnej.**

### **Sposób zakładania:**

- Wyrób zakładać na koszulkę bawełnianą.
- Po raz pierwszy wyrób powinien być założony pacjentowi przez lekarza lub przez przeszkolony personel medyczny.
- Kamizelka jest dwustronna dlatego może być stosowana zarówno na prawe jak i lewe ramię.
- Dodatkowa taśma na rzep umożliwia precyzyjne ustawienia pozycji zabezpieczonej kończyny, ściśle według zaleceń lekarza.

Sposób zakładania obrazuje poniższy schemat (2 sposoby zakładania):

I. Zgięcie łokcia 90° – maksymalna stabilizacja z uniesieniem kończyny.

II. Zgięcie łokcia 90° lub 120° – odciążenie kończyny w przywiedzeniu.

### **Przechowywanie:**

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

### **Przepis prania:**

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować! Suszyć z daleka od źródeł ciepła.

### **Uwagi:**

- Stosowanie wyrobu należy konsultować z lekarzem, stosować ściśle według wskazań i pod nadzorem lekarza.
- Nie stosować wyrobu jeśli wcześniej użyto maści lub żelu rozgrzewającego.
- W przypadku niewłaściwego dopasowania rozmiaru (zbyt mały rozmiar) może wystąpić czasowe upośledzenie pracy jelit i narządów wewnętrznych lub upośledzenie wydolności krążeniowo-oddechowej. Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja i pranie wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka albo powstanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

### **Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Rozmiar:** S , M , L , XL , XXL