

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/kamizelka-ortopedyczna-obojczykowo-barkowa-pt0222-p-6488.html>



Kamizelka ortopedyczna obojczykowo - barkowa PT0222

Cena	150,00 zł
Numer katalogowy	PT0222
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- leczenie, doleczenie urazów i kontuzji stawu barkowego, ramiennego, ramiennie-obojczykowego i łokciowego (w tym zwichnięcia, urazy tkanek miękkich tułowia)
- po urazach struktur kostnych obręczy piersiowej i kończyny górnej
- w ostrych zespołach bólowych w stawie barkowym
- w stanach zapalnych i zmianach zwyrodnieniowych stawu barkowego, obręczy piersiowej i kończyny górnej wymagających unieruchomienia i odciążenia
- po zabiegach operacyjnych ortopedycznych, neurochirurgicznych
- podczas rehabilitacji pooperacyjnej, pourazowej
- w leczeniu zmian reumatologicznych, neurologicznych
- w konieczności podtrzymania i częściowego unieruchomienia kończyny górnej, jako stabilizator, np. po zdjęciu unieruchomienia gipsowego
- kamizelka ustala ramię w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej w stawie ramiennym (panewkowo-ramiennym), natomiast staw łokciowy i przedramię ustala blisko tułowia (możliwość regulacji zgięcia w stawie łokciowym w zakresie 90°-120°)
- zastosowany w konstrukcji wyrobu materiał o charakterze samoszczepnym daje duże możliwości regulacyjne

PRZECIWWSKAZANIA:

- nie stosować w przypadku złamań lub zwichnięć stawu barkowego, które wymagają stabilniejszego zabezpieczenia np. w formie opatrunku gipsowego

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	XXL
Obwód klatki piersiowej [cm]	50 – 60	61 – 70	71 – 80	81 – 90	91 – 110	111 – 130

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu klatki piersiowej, a następnie wybrać rozmiar z tabeli.

Uwaga! Nie stosować bezpośrednio na rany, otarcia naskórka, uszkodzoną skórę oraz w przypadku egzemy lub alergii skórnej.

Sposób zakładania:

- Wyrób zakładać na koszulkę bawełnianą.
- Po raz pierwszy wyrób powinien być założony pacjentowi przez lekarza lub przez przeszkolony personel medyczny.
- Kamizelka jest dwustronna dlatego może być stosowana zarówno na prawe jak i lewe ramię.
- Dodatkowa taśma na rzep umożliwia precyzyjne ustawienia pozycji zabezpieczonej kończyny, ściśle według zaleceń lekarza.

Sposób zakładania obrazuje poniższy schemat (2 sposoby zakładania):

I. Zgięcie łokcia 90° – maksymalna stabilizacja z uniesieniem kończyny.

II. Zgięcie łokcia 90° lub 120° – odciążenie kończyny w przywiedzeniu.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować! Suszyć z daleka od źródeł ciepła.

Uwagi:

- Stosowanie wyrobu należy konsultować z lekarzem, stosować ściśle według wskazań i pod nadzorem lekarza.
- Nie stosować wyrobu jeśli wcześniej użyto maści lub żelu rozgrzewającego.
- W przypadku niewłaściwego dopasowania rozmiaru (zbyt mały rozmiar) może wystąpić czasowe upośledzenie pracy jelit i narządów wewnętrznych lub upośledzenie wydolności krążeniowo-oddechowej. Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja i pranie wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka albo powstanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S , M , L , XL , XXL