

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/majtki-przepuklinowe-damskie-pt0112-p-6535.html>



Majtki przepuklinowe damskie PT0112

Cena	150,00 zł
Numer katalogowy	PT0112
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- po operacjach rozległych przepuklin pachwinowych lub udowych
- łagodzą ciągnące do pachwin bóle brzucha
- zabezpieczają uwypuklanie się worka przepuklinowego podczas wykonywania podstawowych czynności
- przydatne u pacjentek, u których istnieją przeciwwskazania do leczenia operacyjnego
- profilaktycznie u chorych ze zwiotczającymi mięśniami brzucha i poszerzonymi kanałami pachwinowymi

PRZECIWWSKAZANIA:

- nie stosować w przypadku przepukliny nieodprowadzalnej, ponieważ płytka/pelota może stwarzać niebezpieczeństwo uszkodzenia ściany jelita

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa [cm]	70 – 80	81 – 90	91 – 100	101 – 115	116 – 130
Obwód bioder [cm]	85 – 95	96 – 105	106 – 115	116 – 125	126 – 135

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu pasa i bioder, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

Majtki założyć tak, aby płytki/peloty zabezpieczały przepuklinę.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

- Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!
- Przed praniem wyjąć płytki/peloty. Po praniu ponownie umieścić je w tych samych miejscach.

Uwagi:

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S , M , L , XL , XXL