

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/obustronny-pas-pachwinowy-z-pelotami-pt0110-p-6533.html>



Obustronny pas pachwinowy z pelotami PT0110

Cena	140,00 zł
Numer katalogowy	PT0110
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- u chorych z przepukliną pachwinową prostą lub skośną
- po operacji w przypadku słabego i wiotkiego aparatu mięśniowo – powięziowego nie dopuszcza do przemieszczania się trzewi na zewnątrz pierścienia kanału pachwinowego
- u pacjentów, których z różnych przyczyn nie można operować
- pas przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn

PRZECIWWSKAZANIA:

- nie stosować w przypadku przepukliny nieodprowadzalnej, ponieważ pelota może stwarzać niebezpieczeństwo uszkodzenia ściany jelita

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa [cm]	70 - 80	81 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu pasa, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

W opakowaniu z pasem obustronnym znajdują się jedna taśma główna z dwoma pelotami i dwie taśmy kroczone. Taśmę główną należy zapiąć nieco poniżej pasa. Taśmę kroczną przypiąć z tyłu do taśmy głównej, a następnie przełożyć wzdłuż wewnętrznej części uda do przodu – dociskając odpowiednio przepuklinę pachwinową – przypiąć koniec taśmy kroczonej do taśmy głównej z przodu. Drugą taśmę kroczną przypiąć analogicznie. Ucisk pasa można regulować indywidualnie w obrębie zapięć rzepowych.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

- Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!
- Przed praniem wyjąć peloty. Po praniu peloty ponownie umieścić w tych samych miejscach.

Uwagi:

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S , M , L , XL , XXL