

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/opaska-elastyczna-stawu-nadgarstkowego-dluga-pt0305-p-6479.html>



Opaska elastyczna stawu nadgarstkowego - długa PT0305

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	PT0305
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

Wskazania / Zastosowanie:

- w przewlekłych zmianach zwyrodnieniowo-reumatycznych stawu nadgarstkowego
- wspomaga leczenie zapalenia ścięgien, a także po operacji rekonstrukcji ścięgien
- jako opatrunek po zdjęciu gipsu - działa przeciwbólowo, zwłaszcza w okresie rehabilitacji
- łagodzi ból, przekrwienie i upośledzenie funkcji ręki
- zapobiega i zwalcza pourazowe obrzęki nadgarstka

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL
Obwód ręki w nadgarstku [cm]		14 - 18	19 - 22	23 - 25	> 25

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu ręki w nadgarstku, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

Opaskę naciągnąć na wysokość stawu nadgarstka tak, aby kciuk umieszczony został w mniejszym otworze. Nosić szwami na zewnątrz.

Nie stosować bezpośrednio na uszkodzoną skórę.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

- Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem.
- W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S , M , L , XL , XXL