

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/opaska-elastyczna-stawu-skokowego-skarpetka-bezszwowa-pt0303-p-6477.html>



## Opaska elastyczna stawu skokowego - skarpetka bezszwowa PT0303

Cena	<b>40,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PT0303</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### Wskazania / Zastosowanie:

- wczesna rehabilitacja stawu po złamaniach, operacjach i urazach
- po zdjęciu opatrunku gipsowego
- chroni staw
- wzmacnia aparat więzadłowy stawu przy wysiłku fizycznym

#### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL
Obwód nogi nad kostką [cm]	19 - 21	22 - 24	25 - 26	27 - 28

### Instrukcja używania:

#### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu nogi nad kostką, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

#### Sposób zakładania:

Część dzianą wyrobu - skarpetkową - wciągnąć na nogę tak, aby węższy ściągacz przypadał na śródstopie, a szerszy ściągacz powyżej kostki. Następnie odpiąć rzepy na taśmie dociągającej i nałożyć ją na nogę - krzyżując na przegubie (według rysunku), zapiąć na rzep regulując ucisk.

#### Przechowywanie:

---

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

**Przepis prania:**

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

**Uwagi:**

- Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem.
- W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.
- Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi.

**Dostępne kolory:**

cielisty PT 0303

czarny PT 0303CZ

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Kolor:** czarny , Cielisty

**Rozmiar:** S , M , L , XL