

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/orteza-piersiowo-ledzwiowo-krzyzowa-324-pt0238-p-6529.html>



## Orteza piersiowo - łędźwiowo - krzyżowa „32/4” PT0238

Cena	<b>250,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PT0238</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### Wskazania / Zastosowanie:

- stabilizacja odcinka łędźwiowo-krzyżowego
- zespoły bólowe odcinka łędźwiowego kręgosłupa o różnej etiologii
- wzmożone napięcie mięśniowe przy dyskopatii łędźwiowej, w procesach zapalnych stawów kręgosłupa, w trakcie leczenia pooperacyjnego oraz w czasie rehabilitacji pourazowej
- wzmocnienie mięśni podczas wykonywania pionizacji pacjenta z urazem ortopedycznym lub neurologicznym
- doleczenie urazów, złamania patologicznych kręgow, zespoły neuropatyczne i korzeniowe
- profilaktyka przeciążeń kręgosłupa, zwłaszcza pozycji wymuszonych i niekorzystnych dla kręgosłupa
- zmiany zwyrodnieniowe
- osteoporoza
- po złamaniach trzonów kręgow łędźwiowych
- w celu utrzymania prawidłowego ustawienia kręgow po fizjoterapii i terapii manualnej kręgosłupa

#### INSTRUKCJA UŻYWANIA

##### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu miejsca wskazanego w tabeli, a następnie wybrać rozmiar.

##### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód brzucha	71 – 80	81 – 90	91 – 100	101 – 110	111 – 120	121 – 130	131 – 140

w najszerszym  
miejscu [cm]

Produkty w rozmiarze XS oraz XXXL są dostępne na zamówienie, z wydłużonym okresem oczekiwania

##### Sposób zakładania:

- 
- Odpiąć rzepy.
  - Ortezę założyć, obejmując odcinek lędźwiowo-krzyżowy tak, aby napięcie na rzep przypadło z przodu.
  - Ortezę zapiąć z przodu na rzepy, a następnie zapiąć górne i dolne taśmy dociągające, regulując indywidualnie dopasowanie.
  - Niewskazane jest regulowanie wysokości wyrobu poprzez naciąganie go w górę lub w dół po zapięciu rzepów, gdyż może to spowodować rozdarcie dzianiny. Jeśli skorygowanie wysokości jest konieczne, należy najpierw rozpiąć rzepy, a następnie ustawić wyrób w odpowiedniej pozycji i ponownie je zapiąć.

#### **Przechowywanie:**

W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

#### **Przepis prania:**

Przed praniem wyjąć stalki z ortozy oraz zapiąć rzepy w celu uniknięcia zahaczenia wyrobu.

#### **Uwagi:**

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować wyrobu na rany, chorobowo zmienioną lub uszkodzoną skórę.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem.

#### **Wyrób jest zapinany na rzepy.**

Wysokość wyrobu 32 cm.

#### **Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Kolor:** szary , Cielisty

**Rozmiar:** XS , S , M , L , XL , XXL , XXXL