

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/orteza-piersiowo-ledzwiowo-krzyzowa-324-pt0238-p-6529.html>



Orteza piersiowo - łędźwiowo - krzyżowa „32/4” PT0238

Cena	250,00 zł
Numer katalogowy	PT0238
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

Wskazania / Zastosowanie:

- stabilizacja odcinka łędźwiowo-krzyżowego
- zespoły bólowe odcinka łędźwiowego kręgosłupa o różnej etiologii
- wzmożone napięcie mięśniowe przy dyskopatii łędźwiowej, w procesach zapalnych stawów kręgosłupa, w trakcie leczenia pooperacyjnego oraz w czasie rehabilitacji pourazowej
- wzmocnienie mięśni podczas wykonywania pionizacji pacjenta z urazem ortopedycznym lub neurologicznym
- doleczenie urazów, złamania patologicznych kręgow, zespoły neuropatyczne i korzeniowe
- profilaktyka przeciążeń kręgosłupa, zwłaszcza pozycji wymuszonych i niekorzystnych dla kręgosłupa
- zmiany zwyrodnieniowe
- osteoporoza
- po złamaniach trzonów kręgow łędźwiowych
- w celu utrzymania prawidłowego ustawienia kręgow po fizjoterapii i terapii manualnej kręgosłupa

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu miejsca wskazanego w tabeli, a następnie wybrać rozmiar.

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód brzucha	71 – 80	81 – 90	91 – 100	101 – 110	111 – 120	121 – 130	131 – 140

w najszerszym
miejscu [cm]

Produkty w rozmiarze XS oraz XXXL są dostępne na zamówienie, z wydłużonym okresem oczekiwania

Sposób zakładania:

-
- Odpiąć rzepy.
 - Ortezę założyć, obejmując odcinek lędźwiowo-krzyżowy tak, aby zapięcie na rzep przypadło z przodu.
 - Ortezę zapiąć z przodu na rzepy, a następnie zapiąć górne i dolne taśmy dociągające, regulując indywidualnie dopasowanie.
 - Niewskazane jest regulowanie wysokości wyrobu poprzez naciąganie go w górę lub w dół po zapięciu rzepów, gdyż może to spowodować rozdarcie dzianiny. Jeśli skorygowanie wysokości jest konieczne, należy najpierw rozpiąć rzepy, a następnie ustawić wyrób w odpowiedniej pozycji i ponownie je zapiąć.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Przed praniem wyjąć stalki z ortezy oraz zapiąć rzepy w celu uniknięcia zahaczenia wyrobu.

Uwagi:

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować wyrobu na rany, chorobowo zmienioną lub uszkodzoną skórę.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem.

Wyrób jest zapinany na rzepy.

Wysokość wyrobu 32 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: szary , Cielisty

Rozmiar: XS , S , M , L , XL , XXL , XXXL