

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/orteza-stawu-łokciowego-z-regulacja-kata-zgięcia-z-ujęciem-reki-lub-bez-humertec-94301-di-p-6254.html>



Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez HUMERTEC® 94301 D/I

Cena **900,00 zł**

Numer katalogowy **94301 D/I**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Stabilizator składa się z dwóch części połączonych monocentrycznymi szynami bocznymi, które pozwalają na regulację kątową zgięcia i wyprost, w zakresie od 0 do 90 stopni w odstępach 30 stopniowych. Szyny wsunięte są w kieszenie utworzone przez dodatkowe warstwy materiału przyczepionego za pomocą micro-velcro, takie rozwiązanie pozwala na szybką i łatwą regulację na długość. Nakładki tworzące kieszenie mają anatomiczny kształt oraz są dodatkowo perforowane by zwiększyć odpływ nadmiaru ciepła z ciała. Rękawy ramienny i przedramienny z zewnątrz wykończone są welurem, natomiast wewnętrzna część, która ma bezpośredni kontakt z ciałem posiada wykończenie frotte. Wewnętrzne plastikowe sztywniki zwiększają sztywność i zwiększają stopień stabilizacji ortezy natomiast taśmy dociągowe mają szersze końce zapobiegające wysuwaniu się taśm ze sprzączek.

Zastosowanie:

złamania przez-stawowe kości ramiennej w obrębie stawu łokciowego, złamania jednej trzeciej dalszej kości ramiennej, złamania nadkłykciowe, złamania kości łokciowej, promieniowej, złamania patologiczne (Osteolysis, Metastasis), po zabiegach chirurgicznych w obrębie więzadeł stawu łokciowego. W neuropriaxii (czasowe porażenie) na skutek urazu, w przypadku porażenia nerwu promieniowego zaleca się stosowanie wersji z ujęciem kciuka.

Działanie:

wysoki stopień dopasowania i stabilizacji oraz możliwość kontroli zakresu i ustawienia kończyny górnej w stawie łokciowym.

Zakładanie:

JEŻELI SZYNY BYŁY WYCIĄGANE W CELU USTAWIENIA REGULACJI, MUSZĄ BYĆ WŁOŻONE POMIĘDZY WKŁADKI PLASTIKOWE A MATERIAŁ. Produkt musi być zakładany i dopasowywany przez lekarza, technika ortopedę lub fizjoterapeutę. Najpierw należy dopasować wkładki i szyny do budowy pacjenta, ustawić żądany kąt w stawie łokciowym, następnie założyć ujęcia ramienne i przedramienne, w dalszej kolejności wsunąć szyny w odpowiednie miejsca. Oś szyn powinna pokrywać się z osią stawu, następnie należy dociągnąć taśmy stabilizujące. Zegar oferuje możliwość ustawienia kąтового poprzez dołączony klucz imbusowy.

Pakowanie:D-prawy / I-lewy.

Długość:długość stabilizatora może być regulowana od 42 do 44cm.

Kolor:szary.

Tabela - rozmiary:

| ROZMIAR | Obwód w połowie ramienia | Obwód w połowie | Obwód nadgarstka w modelach |
|---------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|
|---------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|

| | | | |
|---|-------|--------------------|-------------|
| | (cm) | przedramienia (cm) | 94301/94302 |
| S | 26-32 | 20-25 | |
| M | 32-37 | 25-30 | 18-22 |
| L | 37-43 | 30-35 | >22 |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S , M , L

TYP: lewy , prawy