

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/ortezy-walkon-trimable-zapobiegajace-opadaniu-stopy-28u23-p-9553.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Ortezy WalkOn Trimable zapobiegające opadaniu stopy 28U23

Cena	1 150,00 zł
Producent	Ottobock

Opis produktu

Bezpieczniejszy chód

Ludzie z trwałym uszkodzeniem mięśnia strzałkowego uzależnieni są od pomocy medycznej, która unosi ich stopy w fazie przenoszenia.

To jest dokładnie to, co potrafi WalkOn. Pomaga podnieść stopę podczas fazy przenoszenia, tak że chód staje się ponownie bardziej bezpieczny, a ryzyko potknięcia się i upadku jest mniejsze. Palce stopy już nie zahaczają o małe przeszkody lub nierówne podłoże.

Ortezy WalkOn są wykonane z włókna węglowego, które jest bardzo lekkie. Umieszczone z tyłu sprężyste ramię z włókna węglowego rozciąga się od ścięgna Achillesa do łydki. Użytkownikom z zanikiem mięśniowym WalkOn zapewnia wsparcie podczas chodzenia. W fazie odrywania dużego palca od podłoża orteza uwalnia wcześniej zgromadzoną energię co sprawia, że chód staje się płynniejszy. Staw skokowy jest w tym samym czasie stabilizowany.

Rodzina produktów WalkOn

Istnieją cztery ortezy WalkOn. Pozwala to lekarzowi lub technikowi ortopedzie wybrać produkt, który jest najbardziej odpowiedni dla Twojej kondycji i stopnia porażenia.

Jedyną różnicą między WalkOn i WalkOn Trimable jest sposób, w jaki technik ortopeda dostosowuje ortezę do Ciebie. Twój specjalista wybierze najlepsze rozwiązanie.

Korzyści w skrócie:

Więcej bezpieczeństwa

Zyskujesz bezpieczeństwo, ponieważ WalkOn wspiera i podnosi Twoją stopę podczas fazy przechylu przy chodzeniu. Ryzyko zahaczenia czubkiem stopy na przykład o krawędź dywanu lub nierówność terenu jest zmniejszone.

Chodź bardziej naturalnie

Specjalny materiał magazynuje energię przy stawianiu pięty i uwalnia ją ponownie podczas ruchu rollover stopy. To sprawia, że chodzenie jest dla Ciebie bardziej naturalne, niezależnie od tego czy idziesz wolno lub szybko, lub jak bardzo obciążasz stopę swoim ciężarem.

Naturalny ruch

W ciągu dnia można poruszać się z WalkOn. Przy kucaniu lub wchodzeniu na schody na przykład, można na przednią część stopy nakładać naturalny ciężar. WalkOn idealnie nadaje się do wielu codziennych sytuacji.

Lekka i dyskretna

WalkOn jest lekka, smukła i dyskretna pod ubraniem. Zdejmowana wyściółka łydki czyni ją jeszcze bardziej przyjemną i wygodną dla Ciebie. Wykonana jest z materiału oddychającego (Outlast), który zmniejsza nagrzewanie i pocenie.

Używaj zwykłego obuwia

Orteza zmieści się do każdego buta, który ma podparcie. Należy jedynie upewnić się, że but ma wzmocnioną piętę. Aby założyć ortezę, należy włożyć WalkOn do buta, a następnie włożyć stopę.

Solidna i trwała

WalkOn jest szczególnie mocna. Udowodniono jej trwałość w licznych testach i badaniach długoterminowego funkcjonowania.

Wskazania:

- Osłabienie mięśnia strzałkowego o lekkiej lub umiarkowanej spastyczności
- WalkOn nadaje się do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych oraz na wolnym powietrzu przez użytkowników bez lub z tylko łagodnymi zaburzeniami kontroli motorycznej w stawie kolanowym i ewentualnie lekką niestabilnością stawu skokowego.
- Oznaki występują często po udarze, pourazowym uszkodzeniu mózgu, w przypadku stwardnienia rozsianego, atrofii nerwowo-mięśniowej i porażeniu nerwu strzałkowego

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 36 - 39 , 39-42 , 42-45 , 45-48

TYP: lewy , prawy