

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/otwarta-orteza-szynowa-lokcia-z-regulacja-ruchomosci-stawu-okg-04-p-6109.html>



Otwarta orteza szynowa łokcia z regulacją ruchomości stawu OKG-04

Cena	250,00 zł
Numer katalogowy	OKG-04
Producent	Reh4Mat
wypełnienie	Mocny (zielona)
Rozmiar	163.105, 6, 7, 8

Opis produktu

ZESPÓŁ KANAŁU NERWU ŁOKCIOWEGO (Zespół Rowka Nerwu Łokciowego)

Zespół kanału łokciowego, zwany również **neuropatią łokcia**, spowodowany jest narastającym uciskiem nerwu łokciowego, który biegnie w obrębie bruzdy nerwu na wysokości nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej.

Osoby, które nagminnie opierają się na łokciu na twardej powierzchni lub przez dłuższy czas mają zgięty łokieć, np. w trakcie rozmowy przez telefon lub podczas spania z ręką pod poduszką, są wyjątkowo narażone na dolegliwości ze strony zespołu kanału łokciowego.

Ponadto, **zespół kanału nerwu łokciowego** jest bardzo popularny wśród osób aktywnych fizycznie, które wykonują ruchy skrętne łokcia oraz rzuty prowadzące do uszkodzeń więzadeł. Dlatego, schorzenie to jest bardzo popularne wśród baseballowców i piłkarzy ręcznych.

Podstawowymi objawami **zespołu rowka nerwu łokciowego** jest uczucie bólu i drętwienia w obrębie łokcia. Poza tym, pacjenci skarżą się na charakterystyczne mrowienie, szczególnie w rejonie małego i serdecznego palca. Nieleczony zespół kanału łokciowego może prowadzić do bardzo poważnych komplikacji, tj. osłabienie chwytu czy typowa dla neuropatii łokciowej deformacja dłoni, w której IV i V palec przyjmują nienaturalną pozycję wyprostną w stawie śródręczno-paliczkowym oraz zgięciową w stawach międzypaliczkowych.

W przypadku zespołu kanału łokciowego operacja zazwyczaj jest ostatecznością, a leczenie sprowadza się do działań zachowawczych. Najbardziej efektywne jest połączenie fizykoterapii wraz ze stosowaniem **specjalnej ortezy OKG-04**, nie pozwalającej na nadmierne zgięcie łokcia oraz zapobiegająca **zespołowi kanału łokciowego**.

Charakterystyka produktu

Otwarta szynowa orteza łokcia OKG-04 służy do zapobiegania **zespołowi kanału łokciowego**, poprzez ustawienie łokcia w odpowiedniej pozycji. Orteza wyposażona jest w specjalne możliwe do doksztalcenia **aluminiowe stalki**, które uniemożliwiają zgięcie łokcia. Takie rozwiązanie redukuje ucisk, generowany na nerw łokciowy, powoduje jego odbarczenie i zmniejsza dolegliwości bólowe.

Orteza OKG-04 jest doskonałym rozwiązaniem do stosowania w trakcie snu, gdy nieświadomie przez długi czas zginamy nadgarstek i powodujemy ucisk nerwu łokciowego.

Orteza łokcia OKGD-04 została wykonana z innowacyjnego surowca **UniPren**. Jest to uniwersalny trójwarstwowy surowiec, składający się z zewnętrznej elastycznej poliamidowej dzianiny okładkowej o funkcji samoszczepnej, wewnętrznego rdzenia z pianki neoprenowej oraz elastycznej jerseyowej dzianiny okładkowej. Materiał ten charakteryzuje się miękkością i bardzo wysoką elastycznością. Bardzo ważnym atutem tego surowca jest to, że nie jest to wyrób dziany, nie posiada grubych włókien, przez co jego sploty nie odciskają się na skórze pacjenta i nie powodują ran w miejscach o dużej kompresji. Ortezy wykonane z surowca **UniPren** to najmocniejsze i najskuteczniej stabilizujące ortozy dostępne na rynku. Funkcja samoszczepna, surowca zdecydowanie ułatwia użytkowanie. Ponadto surowiec ten jest wodoodporny.

Otwarta konstrukcja wyrobu ułatwia jego użytkowanie i pozwala precyzyjnie dopasować go do kształtów ciała pacjenta.

Wyrób posiada wąskie mankiety ramienia i przedramienia.

Orteza stawu łokciowego OKG-04 doskonale również sprawdza się w okresie pooperacyjnym lub po interwencjach w okolicy stawu łokciowego. Odkryty łokieć ułatwia opiekę pooperacyjną i pozwala na łatwą wymianę opatrunków, bez konieczności zdejmowania ortozy w kończynie. Nie bez znaczenia jest również to, że pooperacyjne opatrunki łokcia można wymieniać bez zmiany kąta ustawienia kończyny górnej.

Orteza szynowa łokcia OKG-04 jest również doskonałym produktem dla osób, cierpiących z powodu **wzmoczonego napięcia mięśniowego** oraz **porażenia spastycznego**. Zastosowanie naszej **ortozy OKG-04** pozwala na redukcję **spastyki zgięciowej stawu** w przypadku wystąpienia udaru lub innych schorzeń neurologicznych.

W ortezie zainstalowano 2 szyny ortopedyczne, których kształt może być dowolnie modyfikowany przez lekarza prowadzącego.

Przeznaczenie

- zespół kanału nerwu łokciowego / Zespół rowka kanału łokciowego / Neuropatia łokciowa
- skręcenia / zwichnięcia stawu łokciowego
- złamanie stawu łokciowego
- okres pooperacyjny łokcia
- deformacje stawu łokciowego
- przykurcze zgięciowe łokcia