

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/owijana-orteza-stawu-kolanowego-z-szynami-bocznymi-i-zakresem-regulacji-katow-zgięcia-i-wyprostu-p-15623.html>



## Owijana orteza stawu kolanowego z szynami bocznymi i zakresem regulacji kątów zgięcia i wyprostu

Cena	<b>745,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>OPL482</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Orteza kolana zapinana z przodu wykonana z trzywarstwowego elastycznego materiału przepuszczalnego dla ciepła i wilgoci; zawiera pozwalające na regulację kątów zgięcia i wyprostu szyny boczne; ponadto orteza wyposażona jest w dwie nieelastyczne taśmy dociągowe pozwalające dopasować siłę przylegania szyn, stopień kompresji ortezy a poprzez to efektywność oddziaływania stabilizatora na staw; konstrukcja produktu pozwala na skuteczne dopasowanie w przypadku dysproporcji w budowie kończyny między udem a podudziem; warstwa zewnętrzna materiału zapewnia szybkie oddawanie ciepła i wilgoci z ciała na zewnątrz, warstwa środkowa jest miękka zapewniając dopasowanie, natomiast wewnętrzna wykonana jest z frotte co zapobiega powstawaniu otarć a ponadto znajduje się tutaj antypoślizgowa warstwa bąbelkowego silikonu; okolica podkolanowa jest wyposażona w otwór, który jest zasłonięty elastycznym materiałem.

- Materiał przepuszczalny dla ciepła i wilgoci
- Antypoślizgowy silikon bąbelkowy
- Szyny policentryczne
- Kombinacja różnych sztywnych elementów

### Zalecenia

- Zmiany zwyrodnieniowe.
- Urazy torebki stawowej i więzadeł.
- Przewlekła niestabilność stawu.
- Niestabilność boczna wynikająca z koślawości lub szpotawości.
- Jednostki chorobowe wymagające regulacji zakresu ruchu w stawie.
- Leczenie pooperacyjne i pourazowe.

### Zastosowanie

**Choroby zwyrodnieniowe i zapalenie stawów, kontuzje w obrębie torebki stawowej i więzadeł, chroniczne niestabilności, niestabilność boczna stawu kolanowego - szpotawość lub koślawość, schorzenia wymagające kontroli zakresu ruchu w stawie kolanowym, leczenie pooperacyjne i pourazowe.**

### Działanie

- Stabilizacja i boczno-przyśrodkowe wsparcie stawu kolanowego.

- 
- Kompresja tkanek miękkich.
  - Regulacja zakresu ruchu zgięcia i wyprost.

### Dopasowanie

1. Rozpiąć paski znajdujące się w górnej i dolnej części ortezy, uwalniając ich zapięcia micro-velcro.
2. Otworzyć cztery taśmy owijane dookoła uda i podudzia, odpinając w tym celu odpowiednie zapięcia micro-velcro.
3. Założyć orteż od tyłu na wysokości kolana w taki sposób, aby mechanizmy przegubowe ustawione były równolegle względem siebie i oś ortezy pokrywała się z osią anatomiczną kończyny. Przed dopasowaniem należy wyregulować zakres ruchu zgięcia-wyprost. W tym celu otwieramy pokrywę przegubu, uzyskując w ten sposób dostęp do trzpieni ograniczających, które wyciągamy i po wybraniu żądanej pozycji, ponownie wkładamy (przewidziano możliwość regulacji kąta zgięcia i wyprost w przedziałach: 0-15-30-60-90 stopni), a na końcu zamykamy pokrywę.
4. Zapiąć cztery taśmy udowe i podudziowe, odpowiednio przymocowując ich zapięcia micro-velcro.
5. Zapiąć oba paski w górnej i dolnej części ortezy, przeciągając je przez odpowiednie sprzączki.

### Dobór

**Produkt powinien być dopasowany przez osobę odpowiednio wykwalifikowaną, dobór rozmiaru winien następować według tabeli rozmiarowej, ponieważ za duży ucisk może spowodować utrudnienia w krążeniu i zaburzyć pracę mięśni, w związku z czym radzimy regulować go aż do uczucia optymalnego przylegania produktu do ciała.**

### Rozmiary

ROZMIAR	1	2	3	4
Obwód kolana (cm)	49-55	55-62	62-71	71-82

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3 , 4