

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/owijana-orteza-stawu-kolanowego-z-szynami-bocznymi-i-zakresem-regulacji-katow-zgięcia-i-wyprostu-p-15623.html>



Owijana orteza stawu kolanowego z szynami bocznymi i zakresem regulacji kątów zgięcia i wyprostu

Cena	745,00 zł
Numer katalogowy	OPL482
Producent	Orliman

Opis produktu

Orteza kolana zapinana z przodu wykonana z trzywarstwowego elastycznego materiału przepuszczalnego dla ciepła i wilgoci; zawiera pozwalające na regulację kątów zgięcia i wyprostu szyny boczne; ponadto orteza wyposażona jest w dwie nieelastyczne taśmy dociągowe pozwalające dopasować siłę przylegania szyn, stopień kompresji ortezy a poprzez to efektywność oddziaływania stabilizatora na staw; konstrukcja produktu pozwala na skuteczne dopasowanie w przypadku dysproporcji w budowie kończyny między udem a podudziem; warstwa zewnętrzna materiału zapewnia szybkie oddawanie ciepła i wilgoci z ciała na zewnątrz, warstwa środkowa jest miękka zapewniając dopasowanie, natomiast wewnętrzna wykonana jest z frotte co zapobiega powstawaniu otarć a ponadto znajduje się tutaj antypoślizgowa warstwa bąbelkowego silikonu; okolica podkolanowa jest wyposażona w otwór, który jest zasłonięty elastycznym materiałem.

- Materiał przepuszczalny dla ciepła i wilgoci
- Antypoślizgowy silikon bąbelkowy
- Szyny policentryczne
- Kombinacja różnych sztywnych elementów

Zalecenia

- Zmiany zwyrodnieniowe.
- Urazy torebki stawowej i więzadeł.
- Przewlekła niestabilność stawu.
- Niestabilność boczna wynikająca z koślawości lub szpotawości.
- Jednostki chorobowe wymagające regulacji zakresu ruchu w stawie.
- Leczenie pooperacyjne i pourazowe.

Zastosowanie

Choroby zwyrodnieniowe i zapalenie stawów, kontuzje w obrębie torebki stawowej i więzadeł, chroniczne niestabilności, niestabilność boczna stawu kolanowego - szpotawość lub koślawość, schorzenia wymagające kontroli zakresu ruchu w stawie kolanowym, leczenie pooperacyjne i pourazowe.

Działanie

- Stabilizacja i boczno-przyśrodkowe wsparcie stawu kolanowego.

-
- Kompresja tkanek miękkich.
 - Regulacja zakresu ruchu zgięcia i wyprostu.

Dopasowanie

1. Rozpiąć paski znajdujące się w górnej i dolnej części ortezy, uwalniając ich zapięcia micro-velcro.
2. Otworzyć cztery taśmy owijane dookoła uda i podudzia, odpinając w tym celu odpowiednie zapięcia micro-velcro.
3. Założyć orteżę od tyłu na wysokości kolana w taki sposób, aby mechanizmy przegubowe ustawione były równolegle względem siebie i oś ortezy pokrywała się z osią anatomiczną kończyny. Przed dopasowaniem należy wyregulować zakres ruchu zgięcia-wyprostu. W tym celu otwieramy pokrywę przegubu, uzyskując w ten sposób dostęp do trzpieni ograniczających, które wyciągamy i po wybraniu żądanej pozycji, ponownie wkładamy (przewidziano możliwość regulacji kąta zgięcia i wyprostu w przedziałach: 0-15-30-60-90 stopni), a na końcu zamykamy pokrywę.
4. Zapiąć cztery taśmy udowe i podudziowe, odpowiednio przymocowując ich zapięcia micro-velcro.
5. Zapiąć oba paski w górnej i dolnej części ortezy, przeciągając je przez odpowiednie sprzączki.

Dobór

Produkt powinien być dopasowany przez osobę odpowiednio wykwalifikowaną, dobór rozmiaru winien następować według tabeli rozmiarowej, ponieważ za duży ucisk może spowodować utrudnienia w krążeniu i zaburzyć pracę mięśni, w związku z czym radzimy regulować go aż do uczucia optymalnego przylegania produktu do ciała.

Rozmiary

ROZMIAR	1	2	3	4
Obwód kolana (cm)	49-55	55-62	62-71	71-82

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4