

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/pas-torako-dla-kobiet-na-klatke-piersiowa-z-jednym-otworem-pt0114a-p-6543.html>



## Pas TORAKO dla kobiet - na klatkę piersiową z jednym otworem PT0114A

Cena	<b>150,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PT0114A</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- po operacjach kardiochirurgicznych
- zmniejsza dolegliwości bólowe i stabilizuje zewnątrznie klatkę piersiową
- zmniejsza ryzyko destabilizacji i rozejścia się rany pooperacyjnej
- poprawia warunki gojenia się rany pooperacyjnej
- daje poczucie pewności i komfortu
- przyspiesza powrót do pełnej sprawności po operacji kardiochirurgicznej
- po złamaniach żeber zmniejsza dolegliwości bólowe i stabilizuje klatkę piersiową

#### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód klatki piersiowej [cm]	70 - 80	81 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121 - 130

#### Instrukcja używania:

##### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu klatki piersiowej, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu

##### Sposób zakładania:

Odpiąć rzep i szelki. Pas założyć na klatkę piersiową, zapiąć rzep z przodu i wyregulować długość szelek z zapięciami na rzepy.

##### Przechowywanie:

---

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

**Przepis prania:**

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!

**Uwagi:**

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** S , M , L , XL , XXL , XXXL