

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/pas-z-fiszbinami-siatkowy-pt0216-p-6520.html>



Pas z fiszbinami - siatkowy PT0216

Cena	200,00 zł
Numer katalogowy	PT0216
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

Wskazania / Zastosowanie:

- zespoły bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa o różnej etiologii (zmiany dyskopatyczne)
- zmiany zwyrodnieniowe
- doleczenie urazów
- stabilizacja kręgosłupa w odcinku lędźwiowym
- wzmożone napięcie mięśniowe przy dyskopatii lędźwiowej
- wzmocnienie mięśni
- profilaktyka przeciążeń kręgosłupa, zwłaszcza w pozycjach wymuszonych i niekorzystnych dla kręgosłupa

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód brzucha [cm]		80 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121 - 130	> 130

Sposób zakładania:

- Odpiąć rzepy.
- Pas założyć, obejmując odcinek lędźwiowo-krzyżowy tak, aby fiszbiny były ułożone rozszerzająco do dołu.
- Pas zapiąć z przodu na rzepy, a następnie zapiąć taśmy dociągające, regulując indywidualnie dopasowanie.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Przed praniem zapiąć rzepy w celu uniknięcia zahaczenia wyrobu.

Uwagi:

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować wyrobu na rany, chorobowo zmienioną lub uszkodzoną skórę.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem.

Wyrób jest zapinany na rzepy.

Wysokość wyrobu 24,5 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: XS , S , M , L , XL , XXL , XXXL