

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/pierscien-z-klinem-dla-osob-z-haluksem-medic-line-haluks-duo-ms458-p-13418.html>



## Pierścień z klinem dla osób z haluksem Medic Line HALUKS DUO MS458

Producent

**Mazbit**

### Opis produktu

- żelowy pierścień z klinem dla osób z haluksem
- odwodzi i koryguje niepoprawne ustawienie palucha, separuje paluch od drugiego palca stopy
- zapobiega nachodzeniu palca drugiego na paluch i powstawaniu bolesnych odcisków
- do stosowania głównie w obuwiu uniwersalnym

Rodzaj  
Przeznaczenie  
Obuwie  
Wykonanie  
Rozmiary

Wyroby żelowe/silikonowe  
Haluks  
Sportowe, Trekkingowe, Półbuty  
Elastyczny silikon  
2, 3

### Pranie

Mycie ręczne  
Talk

### Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle ( szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 3 , 2