

Dane aktualne na dzień: 16-06-2025 07:36

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/pionizator-activall-p-5592.html>



Pionizator ACTIVALL™

Cena	3 800,00 zł
------	--------------------

Numer katalogowy	ACTIVALL™
------------------	------------------

Producent	Akces-Med
-----------	------------------

Opis produktu

Pionizator **ACTIVALL™** jest szczególnie doceniany w codziennej rehabilitacji pacjentów zarówno w warunkach domowych, jak i szpitalnych. Urządzenie pozwala na pełną pionizację pacjenta dzięki możliwości zastosowania stabilizatora kończyn dolnych. Umożliwia także samodzielne swobodne przemieszczanie się, a separator stóp zapobiega krzyżowaniu się nóg.

Dzięki pracy z pionizatorem **ACTIVALL™** dzieci mogą stawiać swoje pierwsze kroki, a osoby starsze utrzymywać lub stopniowo odzyskiwać utraconą sprawność.

Lekka i bardzo stabilna podstawa pozwala na łatwe, samodzielne przemieszczanie. Dobre dopasowanie obejm z bezpiecznym zamknięciem daje poczucie bezpieczeństwa i swobody wykonywanych ruchów.

Szeroka gama rozmiarowa sprawia, że urządzenie to znajduje odbiorców o różnym wzroście i wieku. Pozwala użytkownikom zdobywać nowe doświadczenia i prowadzić w miarę możliwości, samodzielne i niezależne życie.

SZCZEGÓLNE ZALETY

Stabilna konstrukcja

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

Samodzielność

Istnieje możliwość samodzielnej pionizacji lub przemieszczania się w urządzeniu.

Gwarancja 24 miesiące

Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Łatwa obsługa

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

2 w 1

Produkt posiada 2 funkcje użytkowe do wykorzystania w jednym urządzeniu. Funkcję statyczną oraz dynamiczną.

- Stylowo wykończona rama pionizatora podkreśla charakter produktu
- Separator kończyn dolnych zapobiega krzyżowaniu się nóg
- Wytrzymała uprząż miednicza zapobiega przed upadkiem
- Możliwość montażu stabilizatora kończyn dolnych. (Funkcja statyczna)
- Możliwość montażu separatora kończyn dolnych. (Funkcja dynamiczna)
- Moduł ACTIVALL CROSS™ umożliwia przyjęcie pozycji stojącej oraz poruszanie się w domu, oddziale szpitalnym czy na świeżym powietrzu.

WSKAZANIA

Zalecany dla osób, u których rozpoznano:

- Choroby zwyrodnieniowe i motodestrukcyjne stawów.
- Chorobowe lub naczyniowe uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów.
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne).
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową.
- Choroby mięśni – dystrofie, miastenie, zapalenie wielomięśniowe.
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn.
- Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego.
- Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).
- Mózgowe porażenie dziecięce – różne postaci.

TABELE POMIAROWE

Symbol W	Opis orientacyjny wzrost użytkownika**	Jednostka [cm]	Rozmiar 1 70 - 100	Rozmiar 2 100 - 130	Rozmiar 3 110 - 150	Rozmiar 4 110 - 170	Rozmiar 5 140 - 200
A/A1	szerokość peloty biodrowej/piersiowej	[cm]	26	28	31	37	42
C	wysokość peloty biodrowej	[cm]	44 - 60	66 - 82	77 - 102	83 - 112	98 - 120
C1	wysokość peloty piersiowej	[cm]	52 - 70	77 - 95	89 - 116	92 - 126	108 - 143
B/B1	głębokość peloty biodrowej*/piersiowej	[cm]	22	25	27	29	35
	obwód peloty biodrowej/piersiowej	[cm]	87	97	106	124	144
	max. waga użytkownika	[kg]	25	40	60	80	95

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

*mierzone bez uprząży miednicznej.

**wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.

[Jak mierzyć pacjenta? – kliknij](#)

WYMIARY I WAGA SPRZĘTU

	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4	Rozmiar 5
Szerokość	[cm]	59	60	63	66	74
Długość	[cm]	73	84	84	91	98
Wysokość	[cm]	54	79	90	96	112
Waga	[kg]	13,5	16,5	18	20,5	23

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

OBOWIĄZUJĄCY KOD NFZ NA INDYWIDUALNY PRZEDMIOT PIONIZUJĄCY

Kod środka	P125
Przeznaczenie	schorzenia wymagające pionizacji ze stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w balkonik specjalny)
Odpłatność	Bezpłatnie do wysokości limitu
Okres używalności	Raz na 5 lat
Lekarze upoważnieni	Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu
Limit NFZ	2000 zł

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 150% limitu NFZ