

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 13:00

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/pionizator-kotek-i-p-5585.html>



Pionizator KOTEK I™

Cena **5 000,00 zł**

Numer katalogowy **KOTEK I™**

Producent **Akces-Med**

Opis produktu

Pionizator **KOTEK I™** powstał z myślą o przedniej pionizacji dzieci, u których dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiają samodzielne przyjmowanie pozycji stojącej. Pionizacja przyczynia się do zdobywania przez dziecko nowych doświadczeń płynących z obserwacji najbliższego otoczenia oraz stymuluje jego rozwój psychofizyczny. Ponadto reguluje ona procesy fizjologiczne oraz dotlenia organizm dziecka. **KOTEK I™** daje wiele korzyści podczas jego użytkowania.

Możliwość łatwej i płynnej zmiany kąta pochylenia (od **25°** do **85°**) nawet z dzieckiem w urządzeniu. Rozbudowany system pelot i pasów bezpieczeństwa sprawia, że dziecko czuje się w **KOTKU I™** bardzo pewnie i bezpiecznie.

W trosce o małego użytkownika produkt został wykonany z ekologicznych, bezpiecznych dla człowieka i środowiska materiałów.

SZCZEGÓLNE ZALETY

Stabilna konstrukcja

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

Materiały ekologiczne

Do produkcji używamy wyłącznie przyjaznych człowiekowi i środowisku materiałów.

Cicha praca

Zastosowanie w wyrobie sprężyny gazowej lub siłownika elektrycznego zapewnia cichą pracę urządzenia.

Tapicerka przestrzenna

Urządzenie zostało wyposażone w oddychającą, przepuszczającą powietrze tapicerkę przestrzenną. Teraz masz pewność, że skóra pozostanie sucha na dłużej.

Łatwa obsługa

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

Wspomaganie pneumatyczne

Sprężyna gazowa pomaga we właściwym ustawieniu kąta pochylenia urządzenia.

Stopki z regulacją 3D

Stopki z regulacją 3D pozwalają na korektę ustawienia stóp we wszystkich płaszczyznach.

Gwarancja 24 miesiące

Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Dodatkowo:

- Sprężyna pneumatyczna pomaga ustawić właściwy kąt pionizacji
- Peloty piersiowe z regulowanym pasem zabezpieczającym
- Stolik z pojemnikiem na zabawki

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Zalecany do stosowania dla osób, u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (m.in. dystrofię, miastenię, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn,
- Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu,
- Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

PRZECIWWSKAZANIA

W trakcie trwania pionizacji należy obserwować osobę pionizowaną. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych, takich jak zblednięcia, pocenie się lub zasłabnięcia, przeciążenie stawów i wynikające z tego deformacje ciała, terapię należy przerwać. Dalsze postępowanie należy skonsultować z lekarzem specjalistą lub fizjoterapeutą, który przepisiał pomoc.

Przeciwwskazaniem bezwzględnym do pionizacji jest krytyczny stan użytkownika.

Przeciwwskazania względne do pionizacji:

- Nadciśnienie tętnicze w spoczynku powyżej **200/110 mmHg**, nadciśnienie płucne, zaburzenia rytmu serca, nieustabilizowana astma, nieustabilizowane zaburzenia metaboliczne, umiarkowane stadium choroby zastawek serca.
- Każdy stan, taki jak gojące się złamanie lub ciężka osteoporoza, który uniemożliwia obciążenie ciężarem własnego ciała w jakikolwiek sposób.
- Złamanie z niepełnym zrostem, chyba że uzyskano zgodę lekarza.
- Pooperacyjne ograniczenia dotyczące obciążania stawów.
- Ból związany ze stanem w pionizatorze (spowodowany podwichnięciem lub zwichnięciem biodra, nadmiernym rozciąganiem tkanek miękkich, nadmiernym uciskiem). Podwichnięcie lub zwichnięcie stawu biodrowego przy braku dolegliwości bólowych nie jest przeciwwskazaniem.

Osoby ze znacznym zgięciem w stawach biodrowych lub kolanowych, a także z przykurczami w obrębie stawu skokowego, mogą nie być w stanie korzystać z pionizatora. Należy zachować ostrożność, aby upewnić się, że pozycja w urządzeniu nie powoduje nadmiernego ucisku lub rozciągania zmienionych chorobowo obszarów ciała. W takich przypadkach pionizacja może być przeciwwskazana do czasu uzyskania większego zakresu ruchu w przykurczonych stawach. W przypadku osób

z upośledzonym układem krążenia (nadciśnienie tętnicze w spoczynku powyżej **200/110 mmHg**, nadciśnienie płucne, zaburzenia rytmu serca, umiarkowane stadium choroby zastawek serca); układem oddechowym (nieustabilizowana astma) oraz nieustabilizowanymi zaburzeniami metabolicznymi, konieczne jest ściśle monitorowanie użytkownika podczas przebywania w pozycji stojącej, aby zapobiec poważnym powikłaniom. Obejmuje to w szczególności kontrolowanie ciśnienia krwi, częstości akcji serca i wszelkich objawów nadciśnienia ortostatycznego.

Tabele rozmiarowe

Symbol	Opis	Jednostka
W	orientacyjny wzrost użytkownika*	[cm]
A	rozstaw pelot biodrowych	[cm]
A ₁	rozstaw pelot piersiowych	[cm]
C	regulacja wysokości pelot biodrowych	[cm]
C ₁	regulacja wysokości pelot piersiowych	[cm]
B/B ₁	głębokość pelot biodrowych/piersiowych	[cm]
	długość stopki	[cm]
	szerokość stopki	[cm]
E	kąt pochylenia pionizatora	[°]
	max. waga użytkownika	[kg]

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

* Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

** Pionizator standardowo wyposażony jest w stopki w rozmiarze XS. (Możliwość zamiany na rozmiar S podczas składania zamówienia).

Wymiary i waga sprzętu

Wymiar	Jednostka
Szerokość	[cm]
Długość	[cm]
Wysokość	[cm]
Waga produktu	[kg]

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

OBOWIĄZUJĄCY KOD NFZ NA PIONIZATOR

Kod środka
Przeznaczenie
Odpłatność
Okres używalności
Lekarze upoważnieni

Limit NFZ

S.10.01
Pionizator
Bezpłatnie do wysokości limitu
Raz na 5 lat
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, neurologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej, rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu
3000 zł

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 150% limitu NFZ