

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/podkolanowki-medyczne-uciskowe-1-klasa-kompresji-pani-teresa-classic-p-14272.html>



PODKOLANÓWKI MEDYCZNE UCISKOWE 1 KLASA KOMPRESJI PANI TERESA® CLASSIC

| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena | 70,00 zł |
| Dostępność | Dostępność - 3 dni |
| Numer katalogowy | PT 0408 |
| Kod producenta | PT 0408 |
| Producent | Pani Teresa |

Opis produktu

Opis produktu

Podkolanówki medyczne uciskowe 1 klasy kompresji są profesjonalnym produktem medycznym, który dzięki zastosowaniu zmiennego, stopniowanego ucisku wykazuje działanie przeciwżylakowe. Wskazaniem do stosowania medycznych podkolanówek uciskowych 1 klasy kompresji są profilaktyka oraz leczenie pierwszych etapów choroby żylnnej, takich jak np.: narastający obrzęk kończyn w czasie dnia, uczucie ciężkości nóg, czy pojawiające się tzw. pajęczki żylnie (wszystkie wskazania – patrz poniżej). Dzięki regularnemu stosowaniu podkolanówek uciskowych o zmiennym stopniu kompresji zmniejsza się nasilenie pierwszych objawów choroby.

W celu osiągnięcia gwarantowanej wartości leczniczej, należy dobrać odpowiedni rozmiar produktu poprzez zmierzenie obwodów obu nóg w miejscach wskazanych w tabeli rozmiarów. Pomiaru należy dokonać rano, po nocnym spoczynku, gdy nogi nie są jeszcze obrzęknięte.

Dokładamy wszelkich starań, aby wyroby PANI TERESA® cieszyły się zaufaniem, dlatego produkujemy je według rygorystycznych norm europejskich, w najnowocześniejszej technologii oraz przy użyciu najwyższej klasy surowców. Dzięki temu produkty pod marką PANI TERESA® spełniają wszelkie normy przewidziane dla profesjonalnej, medycznej kompresjoterapii, a przy tym są przyjazne i bezpieczne dla skóry człowieka

Zmienny, stopniowany ucisk, który jest gwarantem efektywnej terapii, dla produktów 1 klasy kompresji wynosi 15 – 21 mmHg. Wartości te potwierdzają certyfikaty.

WSKAZANIA:

- * narastający obrzęk w czasie dnia pracy
- * uczucie zmęczenia i ciężkości nóg odczuwane wieczorem
- * żylaki kończyn dolnych u rodziców, rodzeństwa
- * dziedziczne zaburzenia w zakresie układu krzepnięcia
- * pojawiające się tzw. pajęczki żylnie
- * po rozpoczęciu terapii hormonalnej (leki antykoncepcyjne lub hormonalna terapia zastępcza)
- * widoczne żyły na kończynie bez wyraźnego uwypuklenia nad skórę

* obrzęki nóg i powiększające się żyłki u kobiet ciężarnych

PRZECIWWSKAZANIA:

Miażdżyca tętnic kończyn dolnych, choroba Buergera, tzw. stopa cukrzycowa

Podkolanówki produkowane są dwóch wersjach: z czubkiem otwartym (wolne palce) oraz czubkiem zamkniętym.

Dostępne rozmiary:

S, M, L, XL,

Dostępne kolory:

Dostępne typy:

z czubkiem zamkniętym, z czubkiem otwartym,

Dostępne długości:

krótkie, długie,

Instrukcja używania.

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dobrania rozmiaru zmierzyc obwody nogi w podanych punktach określonych w tabeli rozmiarów, a następnie zmierzyc wysokość A - D i wybrać długość produktu.

Sposób nakładania:

1. Produkt nakładać od palców do kostki, rozprowadzić równomiernie na stopie.
2. Zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty.
3. Nałożyć produkt do kolana. Dokładnie rozprowadzić na łydce do pełnej długości zmniejszając nieco naprężenie wynikające z nakładania.
4. Wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia.

Uwagi:

Medyczne wyroby uciskowe nakłada się inaczej niż zwykłe podkolanówki. Nakładanie medycznych podkolanówek zaleca się rano, przed wstaniem w pozycji leżącej. Dobór rozmiaru i stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem. W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem. Przy używaniu wyrobów o 1 klasie kompresji należy uważać, aby nie uszkodzić wyrobu ostrymi przedmiotami: pierścieniem, zegarkiem, paznokciami. Nieprawidłowa pielęgnacja pięt oraz noszenie niewłaściwego obuwia (np. wkładki w obuwiu zwiększające tarcie) może przyczynić się do powstawania przetarć i uszkodzenia produktu.

Przepis prania:

Prać wodzie o temp. 40°C, prać w delikatnych środkach piorących, nie prasować, nie chlorować, nie wybielać, nie czyścić chemicznie, suszyć w stanie rozłożonym, z dala od źródeł ciepła.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy.

TABELA ROZMIARÓW:

| Oznaczenie miejsca pomiaru | Pomiar (cm) | S | M | L | XL |
|----------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| g | Obwód górnej części uda | 43 - 58 | 52 - 70 | 52 - 74 | 64 - 80 |
| f | Obwód na środku uda | 40 - 52 | 46 - 61 | 49 - 62 | 56 - 69 |
| d | Obwód pod | 27 - 34 | 32 - 40 | 36 - 43 | 40 - 49 |

| | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|
| | kolanem | | | | |
| c | Obwód łydki w największym obwodzie | 29 - 35 | 34 - 41 | 37 - 45 | 42 - 48 |
| b | Obwód kostki mierzony w punkcie naj mniejszego obwodu | 19 - 21 | 22 - 24 | 25 - 27 | 28 - 31 |