

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/podkolanowki-medyczne-uciskowe-2-klasa-kompresji-pani-teresa-classic-p-14276.html>



## PODKOLANÓWKI MEDYCZNE UCISKOWE 2 KLASA KOMPRESJI PANI TERESA® CLASSIC

Cena	<b>120,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>PT 0405</b>
Kod producenta	<b>PT 0405</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### Opis produktu

Podkolanówki medyczne uciskowe 2 klasy kompresji są wyrobem kompresyjnym - przeciwżylakowym. Stosując podkolanówki uciskowe o zmiennym stopniu kompresji ograniczamy obrzęk kończyny dolnej i poprawiamy krążenie krwi. W efekcie następuje zmniejszenie widoczności żyłaków.

Jedynie prawidłowe dobranie rozmiaru produktu gwarantuje wartość leczniczą. Zgodnie ze stosowanymi przez naszą firmę światowymi standardami, do ustalenia rozmiaru należy pobrać miarę z określonych miejsc kończyny (patrz tabela poniżej).

Pomiary najlepiej wykonywać rano, po nocnym spoczynku. Należy zmierzyć zarówno prawą, jak i lewą nogę, gdyż nie zawsze obwody obu nóg są takie same.

Nasze przeciwżylakowe wyroby kompresyjne są produkowane według rygorystycznych, europejskich norm, w oparciu o wysokie standardy. W procesie tworzenia wykorzystujemy najnowszą technologię oraz ściśle weryfikowane surowce - przyjazne dla skóry człowieka. Produkty PANI TERESA® spełniają wszelkie normy przewidziane dla profesjonalnej, medycznej kompresjoterapii, dzięki czemu umożliwiają szybszy powrót do zdrowia. Są komfortowe i wygodne w noszeniu, a także bezpieczne dla zdrowia pod kątem długoterminowej terapii.

Zmienny, stopniowany ucisk zastosowany w naszych produktach kompresyjnych jest warunkiem efektywnej terapii. Dla wyrobów 2 klasy kompresji wynosi on 23 - 32 mmHg. Wartości te potwierdzają stosowne certyfikaty.

#### **WSKAZANIA:**

- \* żylaki z towarzyszącymi obrzękami
- \* **zakrzepy żył powierzchniowych i głębokich**
- \* po przebytych zakrzepowym zapaleniu żył (przy obrzękach i bólach)
- \* przed - i pooperacyjna profilaktyka zakrzepowego zapalenia żył
- \* obrzęki po stłuczeniach, złamaniach i zwichnięciach
- \* obrzęki chłonne
- \* noga obrzęknięta, bolesna, „ciężka”

\*po zagojeniu się niewielkich owrzodzeń żyłakowych

\* słoniowaczna nóg i goleni

\* obrzęki nóg i powiększające się żyłaki u kobiet ciężarnych

#### **PRZECIWWSKAZANIA:**

\* miażdżyca tętnic kończyn dolnych, choroba Beurgera, tzw. "stopa cukrzycowa"

Podkolanówki produkowane są w wersji z czubkiem zamkniętym oraz otwartym (wolne palce).

**SKŁAD SUROWCOWY:** Poliamid 79% elastan 21%

**GWARANCJA:** Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy.

#### **Dostępne rozmiary:**

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL,

#### **Dostępne kolory:**

#### **Dostępne typy:**

z czubkiem zamkniętym, z czubkiem otwartym,

#### **Dostępne długości:**

krótkie, długie,

#### **Instrukcja używania.**

#### **Dopasowanie rozmiaru:**

W celu prawidłowego doboru rozmiaru zmierzyc obwody nogi w podanych punktach określonych w tabeli rozmiarów, a następnie zmierzyc wysokość A – D i wybrać długość produktu.

#### **Sposób nakładania:**

1. **Produkt nakładać od palców do kostki, rozprowadzić równomiernie na stopie.**
2. **Zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty.**
3. **Nałożyć produkt do kolana. Dokładnie rozprowadzić na łydce do pełnej długości zmniejszając nieco naprężenie wynikające z nakładania.**
4. **Wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia.**

#### **Uwagi:**

**Dobór klasy kompresji, rozmiar i stosowanie wyrobu należy skonsultować z lekarzem.**

**Przy używaniu wyrobów o 2 stopniu kompresji należy uważać, aby nie uszkodzić wyrobu ostrymi przedmiotami: pierścionkiem, zegarkiem, paznokciami. Nieprawidłowa pielęgnacja pięt oraz noszenie niewłaściwego obuwia (np. wkładki w obuwiu zwiększające tarcie) może przyczynić się do powstawania przetarć i uszkodzenia produktu. Dobór rozmiaru i stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem. W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem.**

#### **Przepis prania:**

Prać wodzie o temp. 40°C, prać w delikatnych środkach piorących, nie prasować, nie chlorować, nie wybielać, nie czyścić chemicznie, suszyć w stanie rozłożonym, z dala od źródeł ciepła.

#### **Przechowywanie:**

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

**Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy.**

#### **TABELA ROZMIARÓW:**

Oznaczenie miejsca pomiaru	Pomiar (cm)	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

---

d	Obwód pod kolanem	28-31	30-33	32-36	35-38	37-41	39-44	43-47
c	Obwód łydki w największym obwodzie	29-32	31-34	33-37	36-39	38-43	40-45	44-49
b	Obwód kostki mierzony w punkcie najmniejszego obwodu	18-20	20-21	21-23	23-25	25-27	27-30	30-32