

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/polsztywny-kołnierz-ortopedyczny-am-km-p-6204.html>

Półsztywny kołnierz ortopedyczny AM-KM



Cena	90,00 zł
Numer katalogowy	AM-KM
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Kołnierz ortopedyczny typu Szcianza AM-KM wykonany jest z pianki poliuretanowej, pokryty bawełnianą dzianiną ortopedyczną. Zapinany jest przy pomocy taśmy VELCRO, służącej do regulacji obwodu.

Właściwości

Stabilizuje i odciąża kręgosłup w odcinku szyjnym, odciąża mięśnie szyi, Wskazania, okres stosowania zależne od decyzji lekarza prowadzącego.

Przeznaczenie

- Po przebytych urazach kręgosłupa szyjnego (skręcenia, stłuczenia).
- w rehabilitacji po przebytych złamaniach kręgosłupa szyjnego leczonych zachowawczo i operacyjnie
- w ostrych i przewlekłych zespołach bólowych szyi i barków spowodowanych urazem, przeciążeniem lub zmianami zwyrodnieniowymi
- w zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego połączonych z objawami neurologicznymi (radikulopatia szyjna, parestezje kończyn górnych, zawroty głowy i zaburzenia równowagi
- w bólach głowy i szumach usznych pochodzenia szyjnego;
- w kręczu szyi spowodowanym różnymi przyczynami
- w bólach głowy i szumach usznych pochodzenia szyjnego;
- w kręczu szyi spowodowanym różnymi przyczynami

Przeciwwskazania

Zbyt ciasne założenie ortozy może prowadzić do nasilenia dolegliwości, zbyt luźne powoduje brak założonego działania. Uczucie duszności i dyskomfort, nasilenie istniejących dolegliwości może znacznie ograniczyć lub nawet uniemożliwić stosowanie ortozy (szczególnie u osób z przerostem tarczycy, przy znacznej otyłości, przy nasilonych zaburzeniach nerwicowych) – po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym. Należy szczególnie kontrolować prawidłowość stosowanie ortozy zgodnie z zaleceniami u dzieci, osób z zaburzeniami pamięci, chorych psychicznie. W przypadku zmian na skórze w miejscach przylegania (otarcia naskórka, zranienia, egzemy skórne) stosowanie ortozy jest ograniczone – możliwe po założeniu opatrunku

Rozmiar
S

Obwód szyi
31-36 cm

Dostępne w wysokości
8,10,12 cm

Sposób dokonywania pomiaru

Rozmiar	Obwód szyi	Dostępne w wysokości	Sposób dokonywania pomiaru
M	36-42 cm		
L	42-48 cm		

Wszystkie rozmiary występują w trzech wysokościach 8, 10, 12 cm

Sposób zakładania

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość: 8 , 10 , 12

Rozmiar: S , M , L