

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/ponczochy-medyczne-uciskowe-1-klasa-kompresji-pani-teresa-classic-p-14270.html>



POŃCZOCHY MEDYCZNE UCISKOWE 1 KLASA KOMPRESJI PANI TERESA® CLASSIC

Cena	100,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	PT 0406
Kod producenta	PT 0406
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

Opis produktu

Pończochy medyczne uciskowe 1 klasy kompresji są profesjonalnym produktem medycznym, który dzięki zastosowaniu zmiennego, stopniowanego ucisku wykazuje działanie przeciwżylakowe. Wskazaniem do stosowania medycznych pończoch uciskowych 1 klasy kompresji są profilaktyka oraz leczenie pierwszych etapów choroby żylnnej, takich jak np.: narastający obrzęk kończyn w czasie dnia, uczucie ciężkości nóg, czy pojawiające się tzw. pajęczki żyłne (wszystkie wskazania – patrz poniżej). Dzięki regularnemu stosowaniu pończoch uciskowych o zmiennym stopniu kompresji zmniejsza się nasilenie pierwszych objawów choroby.

W celu osiągnięcia gwarantowanej wartości leczniczej, należy dobrać odpowiedni rozmiar produktu poprzez zmierzenie obwodów obu nóg w miejscach wskazanych w tabeli rozmiarów. Pomiaru należy dokonać rano, po nocnym spoczynku, gdy nogi nie są jeszcze obrzęknięte.

Dokładamy wszelkich starań, aby wyroby PANI TERESA® cieszyły się zaufaniem, dlatego produkujemy je według rygorystycznych norm europejskich, w najnowocześniejszej technologii oraz przy użyciu najwyższej klasy surowców. Dzięki temu produkty pod marką PANI TERESA® spełniają wszelkie normy przewidziane dla profesjonalnej, medycznej kompresjoterapii, a przy tym są przyjazne i bezpieczne dla skóry człowieka

Zmienny, stopniowany ucisk, który jest gwarantem efektywnej terapii, dla produktów 1 klasy kompresji wynosi 15 – 21 mmHg. Wartości te potwierdzają certyfikaty.

WSKAZANIA:

- * narastający obrzęk w czasie dnia pracy
- * uczucie zmęczenia i ciężkości nóg odczuwane wieczorem
- * żylaki kończyn dolnych u rodziców, rodzeństwa
- * dziedziczne zaburzenia w zakresie układu krzepnięcia
- * pojawiające się tzw. pajęczki żyłne
- * po rozpoczęciu terapii hormonalnej (leki antykoncepcyjne lub hormonalna terapia zastępcza)
- * widoczne żyły na kończynie bez wyraźnego uwypuklenia nad skórę

* obrzęki nóg i powiększające się żyłki u kobiet ciężarnych

PRZECIWWSKAZANIA:

* Miażdżyca tętnic kończyn dolnych, choroba Buergera, tzw. stopa cukrzycowa

Pończochy produkowane są w wersji z czubkiem otwartym (wolne palce) i zamkniętym.

SKŁAD SUROWCOWY: Poliamid 78% Elastan 22% + taśma z silikonem

GWARANCJA: Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy.

Dostępne rozmiary:

S, M, L, XL,

Dostępne kolory:

Dostępne typy:

z czubkiem zamkniętym, z czubkiem otwartym,

Dostępne długości:

krótkie, długie,

Instrukcja używania.

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dobrania rozmiaru zmierzyc obwody nogi w podanych punktach określonych w tabeli rozmiarów, a następnie zmierzyc wysokość A - G i wybrać długość produktu.

Sposób nakładania:

1. Nakładać od palców do kostki, rozprowadzić równomiernie na stopie.
2. Zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty.
3. Nałożyć do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco naprężenie wynikające z nakładania. Wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia.
4. Nałożyć do pełnej długości.
5. Usunąć wszystkie zmarszczenia, wygładzić.

Uwagi:

Medyczne wyroby uciskowe nakłada się inaczej niż zwykłe pończochy. Nakładanie medycznych pończoch zaleca się rano, przed wstaniem w pozycji leżącej. Dobór rozmiaru i stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem. W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem. Przy używaniu wyrobów o 1 klasie kompresji należy uważać, aby nie uszkodzić wyrobu ostrymi przedmiotami: pierścieniem, zegarkiem, paznokciami. Nieprawidłowa pielęgnacja pięt oraz noszenie niewłaściwego obuwia (np. wkładki w obuwiu zwiększające tarcie) może przyczynić się do powstawania przetarć i uszkodzenia produktu.

Przepis prania:

Prać wodzie o temp. 40°C, prać w delikatnych środkach piorących, nie prasować, nie chlorować, nie wybielać, nie czyścić chemicznie, suszyć w stanie rozłożonym, z dala od źródeł ciepła.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

Wysokość A - G

do 70 cm - krótkie

od 71 cm - długie

Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy.

TABELA ROZMIARÓW:

Oznaczenie miejsca	Pomiar (cm)	S	M	L	XL

g	Obwód górnej części uda	43 - 58	52 - 70	52 - 74	64 - 80
f	Obwód na środku uda	40 - 52	46 - 61	49 - 62	56 - 69
d	Obwód pod kolanem	27 - 34	32 - 40	36 - 43	40 - 49
c	Obwód łydki w największym obwodzie	29 - 35	34 - 41	37 - 45	42 - 48
b	Obwód kostki mierzony w punkcie najmniejszego obwodu	19 - 21	22 - 24	25 - 27	28 - 31