

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/ponczochy-medyczne-uciskowe-2-klasa-kompresji-pani-teresa-classic-p-14275.html>



## POŃCZOCHY MEDYCZNE UCISKOWE 2 KLASA KOMPRESJI PANI TERESA® CLASSIC

Cena	<b>150,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>PT 0403-1</b>
Kod producenta	<b>PT 0403-1</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

Opis produktu

### Opis produktu

Pończochy medyczne uciskowe 2 klasy kompresji są wyrobem kompresyjnym - przeciwżylakowym. Stosując pończochy uciskowe o zmiennym stopniu kompresji ograniczamy obrzęk kończyny dolnej i poprawiamy krążenie krwi. W efekcie następuje zmniejszenie widoczności żyłaków.

Jedynie prawidłowe dobranie rozmiaru produktu gwarantuje wartość leczniczą. Zgodnie ze stosowanymi przez naszą firmę światowymi standardami, do ustalenia rozmiaru należy pobrać miarę z określonych miejsc kończyny (patrz tabela poniżej).

Pomiary najlepiej wykonywać rano, po nocnym spoczynku. Należy zmierzyć zarówno prawą, jak i lewą nogę, gdyż nie zawsze obwody obu nóg są takie same.

Nasze przeciwżylakowe wyroby kompresyjne są produkowane według rygorystycznych, europejskich norm, w oparciu o wysokie standardy. W procesie tworzenia wykorzystujemy najnowszą technologię oraz ściśle weryfikowane surowce – przyjazne dla skóry człowieka. Produkty PANI TERESA® spełniają wszelkie normy przewidziane dla profesjonalnej,

---

medycznej kompresjoterapii, dzięki czemu umożliwiają szybszy powrót do zdrowia. Są komfortowe i wygodne w noszeniu, a także bezpieczne dla zdrowia pod kątem długoterminowej terapii.

Zmienny, stopniowany ucisk zastosowany w naszych produktach kompresyjnych jest warunkiem efektywnej terapii. Dla wyrobów 2 klasy kompresji wynosi on 23 – 32 mmHg. Wartości te potwierdzają stosowne certyfikaty.

### **WSKAZANIA:**

- \* żylaki z towarzyszącymi obrzękami
- \* **zakrzepy żył powierzchniowych i głębokich**
- \* po przebytych zakrzepowym zapaleniu żył (przy obrzękach i bólach)
- \* przed - i pooperacyjna profilaktyka zakrzepowego zapalenia żył
- \* obrzęki po stłuczeniach, złamaniach i zwichnięciach
- \* obrzęki chłonne
- \* noga obrzęknięta, bolesna, „ciężka”
- \* po zagojeniu się niewielkich owrzodzeń żyłakowych
- \* słoniowacizna nóg i goleni
- \* obrzęki nóg i powiększające się żylaki u kobiet ciężarnych

### **PRZECIWWSKAZANIA:**

- \* miażdżyca tętnic kończyn dolnych, choroba Beurgera, tzw. "stopa cukrzycowa"

Pończochy produkowane są w wersji z czubkiem zamkniętym oraz otwartym (wolne palce)

### **Instrukcja używania.**

#### **Dopasowanie rozmiaru:**

W celu prawidłowego dobrania rozmiaru zmierzyc obwody nogi w podanych punktach określonych w tabeli rozmiarów, a następnie zmierzyc wysokość A – G i wybrać długość produktu.

---

## **Sposób nakładania:**

1. Nakładać od palców do kostki, rozprowadzić równomiernie na stopie.
2. Zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty.
3. Nałożyć do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia.
4. Nałożyć do pełnej długości.
5. Usunąć wszystkie zmarszczenia, wygładzić.

## **Uwagi:**

Dobór klasy kompresji, rozmiar i stosowanie wyrobu należy skonsultować z lekarzem.

Medyczne wyroby uciskowe nakłada się inaczej niż zwykłe pończochy. Nakładanie medycznych pończoch zaleca się rano, przed wstaniem w pozycji leżącej. Dobór rozmiaru i stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem. W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem. Przy używaniu wyrobów o 2 klasie kompresji należy uważać, aby nie uszkodzić wyrobu ostrymi przedmiotami: pierścionkiem, zegarkiem, paznokciami. Nieprawidłowa pielęgnacja pięt oraz noszenie niewłaściwego obuwia (np. wkładki w obuwiu zwiększające tarcie) może przyczynić się do powstawania przetarć i uszkodzenia produktu.

## **Przepis prania:**

Prać w wodzie o temp. 40°C, prać w delikatnych środkach piorących, nie prasować, nie chlorować, nie wybielać, nie czyścić chemicznie, suszyć w stanie rozłożonym, z dala od źródeł ciepła.

## **Przechowywanie:**

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

## **Dostępne rozmiary:**

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL,

## **Dostępne typy:**

z czubkiem zamkniętym, z czubkiem otwartym,

## **Dostępne długości:**

---

krótkie, długie,

**SKŁAD SUROWCOWY:** Poliamid 79% Elastan 21% + taśma z silikonem

**Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy.**

**TABELA ROZMIARÓW:**

Oznaczenie miejsca pomiaru	Pomiar ( cm )	XS	S	M	
g	Obwód górnej części uda	43-51	50-53	53-58	
f	Obwód na środku uda	39-46	44-49	49-54	
d	Obwód pod kolanem	28-31	30-33	32-36	
c	Obwód łydki w największym obwodzie	29-32	31-34	33-37	
b	Obwód kostki mierzony w punkcie najmniejszego obwodu	18-20	20-21	21-23	