

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/ponczochy-okolooperacyjne-profilaktyczne-p-10827.html>



Pończochy okołooperacyjne - profilaktyczne

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena | 90,00 zł |
| Numer katalogowy | PT0404 |
| Producent | Pani Teresa |

Opis produktu

Pończochy okołooperacyjne - profilaktyczne 13 - 18 mmHg

Instrukcja używania:

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- profilaktyka przeciwzakrzepowa u chorych przed, w trakcie i po zabiegu operacyjnym
- stosowanie ściśle według wskazań i pod nadzorem lekarza specjalisty

Pończochy okołooperacyjne dostępne są w wersji z czubkiem otwartym (wolne palce), w kolorze białym.

Instrukcja używania:

- stosowanie ściśle według wskazań i pod nadzorem lekarza specjalisty

Dopasowanie rozmiaru:

Dobór rozmiaru i stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

Sposób nakładania:

1. Nakładać od palców do kostki, rozprowadzić równomiernie na stopie.
2. Zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty.
3. Nałożyć do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco naprężenie wynikające z nakładania. Wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia.

-
4. Nałożyć do pełnej długości.
 5. Usunąć wszystkie zmarszczenia, wygładzić.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

- Prać w temp. max. 70°C przy użyciu delikatnych środków piorących.
- Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie sterylizować!

Uwagi:

W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem.

TABELA ROZMIARÓW

Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: biały

Rozmiar: XS , S , M , L , XL , XXL , XXXL