

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/ponczochy-okolooperacyjne-profilaktyczne-pani-teresa-hospital-p-14273.html>



## POŃCZOCHY OKOŁOOPERACYJNE - PROFILAKTYCZNE PANI TERESA® HOSPITAL

Cena	<b>90,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>PT 0404</b>
Kod producenta	<b>PT 0404</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### Opis produktu

Pończochy okołoperacyjne - profilaktyczne PANI TERESA® HOSPITAL, to produkt kompresyjny - przeciwżylakowy. Znajduje zastosowanie przed, w trakcie i po zabiegach operacyjnych, jako uzupełnienie standardów medycznych w profilaktyce przeciwzakrzepowej.

Pończochy PANI TERESA® HOSPITAL są wykonane ze ściśle weryfikowanych surowców, dzięki czemu są przyjazne dla skóry. Są obok farmakoterapii bardzo skuteczną ochroną przed zakrzepicą żył, na którą są narażeni pacjenci unieruchomieni w wyniku różnego rodzaju operacji chirurgicznych. Pończochy te mogą być stosowane nawet podczas długoterminowej terapii.

Zgodnie ze stosowanymi przez naszą firmę światowymi standardami, do określenia rozmiaru należy pobrać miarę z określonych miejsc kończyny (patrz tabela poniżej). Najlepiej jest to wykonać przed pójściem do szpitala (gdy operacja jest planowana). W razie nieplanowanych zabiegów pomiaru dokona pielęgniarka na oddziale. Zwracamy uwagę, że najlepszą porą dnia na dokonanie pomiarów jest czas tuż po przebudzeniu, gdy nogi po nocnym spoczynku nie są obrzęknięte. Powinno się zmierzyć zarówno prawą, jak i lewą nogę, gdyż nie zawsze obwody na obu kończynach są takie same.

Zmienny, stopniowany ucisk zastosowany w produktach PANI TERESA® HOSPITAL wynosi 13 - 18 mmHg. Wartości te potwierdzone są certyfikatami.

Ze względu na zastosowanie wyrobu wyłącznie w warunkach szpitalnych pończochy PANI TERESA HOSPITAL produkowane są wyłącznie w wersji z czubkiem otwartym (wolne palce, aby lekarz mógł na bieżąco kontrolować ukrwienie) i tylko w kolorze białym.

#### **WSKAZANIA:**

- \* profilaktyka przeciwzakrzepowa u chorych przed, w trakcie i po zabiegu operacyjnym
- \* stosowanie ściśle według wskazań i pod nadzorem lekarza specjalisty

Pończochy okołoperacyjne dostępne są w wersji z czubkiem otwartym (wolne palce), w kolorze białym.

**SKŁAD SUROWCOWY:** Poliamid 78% elastan 22%

**GWARANCJA:** Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy.

**Dostępne rozmiary:**

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL,

**Instrukcja używania:**

\* stosowanie ściśle według wskazań i pod nadzorem lekarza specjalisty

**Dopasowanie rozmiaru:****Dobór rozmiaru i stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.****Sposób nakładania:**

1. **Nakładać od palców do kostki, rozprowadzić równomiernie na stopie.**
2. **Zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty.**
3. **Nałożyć do kolana, dokładnie rozprowadzić na tyłce zmniejszając nieco naprężenie wynikające z nakładania. Wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia.**
4. **Nałożyć do pełnej długości.**
5. **Usunąć wszystkie zmarszczenia, wygładzić.**

**Uwagi:****W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem.****Przepis prania:**

Prać w temp. max. 70°C przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie sterylizować!

**Przechowywanie:**

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

**Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy.****TABELA ROZMIARÓW:**

Oznaczenie miejsca pomiaru	Pomiar ( cm )	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
g	Obwód górnej części uda	43-51	50-53	53-58	57-63	62-69	63-72	64-78
f	Obwód na środku uda	39-46	44-49	49-54	53-56	56-65	64-70	67-75
d	Obwód pod kolanem	28-31	30-33	32-36	35-38	37-41	39-44	43-47
c	Obwód łydki w największym obwodzie	29-32	31-34	33-37	36-39	38-43	40-45	44-49
b	Obwód kostki mierzony w	18-20	20-21	21-23	23-25	25-27	27-30	30-32

---

punkcie najmniej szego obwodu							
--	--	--	--	--	--	--	--