

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/rajstopy-medyczne-uciskowe-1-klasa-kompresji-pani-teresa-classic-p-14271.html>



## RAJSTOPY MEDYCZNE UCISKOWE 1 KLASA KOMPRESJI PANI TERESA® CLASSIC

Cena	<b>110,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>PT 0407</b>
Kod producenta	<b>PT 0407</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### Opis produktu

Rajstopy medyczne uciskowe 1 klasy kompresji są profesjonalnym produktem medycznym, który dzięki zastosowaniu zmiennego, stopniowanego ucisku wykazuje działanie przeciwżylakowe. Wskazaniem do stosowania medycznych rajstop uciskowych 1 klasy kompresji są profilaktyka oraz leczenie pierwszych etapów choroby żylnnej, takich jak np.: narastający obrzęk kończyn w czasie dnia, uczucie ciężkości nóg, czy pojawiające się tzw. pajęczki żyłne (wszystkie wskazania – patrz poniżej). Dzięki regularnemu stosowaniu rajstop uciskowych o zmiennym stopniu kompresji zmniejsza się nasilenie pierwszych objawów choroby.

W celu osiągnięcia gwarantowanej wartości leczniczej, należy dobrać odpowiedni rozmiar produktu poprzez zmierzenie obwodów obu nóg w miejscach wskazanych w tabeli rozmiarów. Pomiaru należy dokonać rano, po nocnym spoczynku, gdy nogi nie są jeszcze obrzęknięte.

Dokładamy wszelkich starań, aby wyroby PANI TERESA® cieszyły się zaufaniem, dlatego produkujemy je według rygorystycznych norm europejskich, w najnowocześniejszej technologii oraz przy użyciu najwyższej klasy surowców. Dzięki temu produkty pod marką PANI TERESA® spełniają wszelkie normy przewidziane dla profesjonalnej, medycznej kompresjoterapii, a przy tym są przyjazne i bezpieczne dla skóry człowieka

Zmienny, stopniowany ucisk, który jest gwarantem efektywnej terapii, dla produktów 1 klasy kompresji wynosi 15 – 21 mmHg. Wartości te potwierdzają certyfikaty.

#### WSKAZANIA:

- \* narastający obrzęk w czasie dnia pracy
- \* uczucie zmęczenia i ciężkości nóg odczuwane wieczorem
- \* żylaki kończyn dolnych u rodziców, rodzeństwa
- \* dziedziczne zaburzenia w zakresie układu krzepnięcia
- \* pojawiające się tzw. pajęczki żyłne
- \* po rozpoczęciu terapii hormonalnej (leki antykoncepcyjne lub hormonalna terapia zastępcza)
- \* widoczne żyły na kończynie bez wyraźnego uwypuklenia nad skórę

\* obrzęki nóg i powiększające się żyłki u kobiet ciężarnych

#### **PRZECIWWSKAZANIA:**

\* Miażdżyca tętnic kończyn dolnych, choroba Buergera, tzw. stopa cukrzycowa

Rajstopy produkowane są w wersji z czubkiem zamkniętym oraz w wersji specjalnej dla kobiet w ciąży PT0411.

#### **Dostępne rozmiary:**

**S, M, L, XL,**

#### **Dostępne kolory:**

#### **Dostępne długości:**

**krótkie, długie,**

#### **Instrukcja używania.**

#### **Dopasowanie rozmiaru:**

W celu prawidłowego doboru rozmiaru zmierzyc obwody nogi w podanych punktach określonych w tabeli rozmiarów, a następnie zmierzyc wysokość A - G i wybrać długość produktu.

#### **Sposób nakładania:**

1. Nakładać od palców do kostki, rozprowadzić równomiernie na stopie.
2. Zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty.
3. Nałożyć do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia.
4. Nałożyć do pełnej długości.
5. Usunąć wszystkie zmarszczenia, wygładzić.

#### **Uwagi:**

Medyczne wyroby uciskowe nakłada się inaczej niż zwykłe rajstopy. Nakładanie medycznych rajstop zaleca się rano, przed wstaniem w pozycji leżącej. Dobór rozmiaru i stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem. W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem. Przy używaniu wyrobów o 1 klasie kompresji należy uważać, aby nie uszkodzić wyrobu ostrymi przedmiotami: pierścieniem, zegarkiem, paznokciami. Nieprawidłowa pielęgnacja pięt oraz noszenie niewłaściwego obuwia (np. wkładki w obuwiu zwiększające tarcie) może przyczynić się do powstawania przetarć i uszkodzenia produktu.

#### **Przepis prania:**

Prać wodzie o temp. 40°C, prać w delikatnych środkach piorących, nie prasować, nie chlorować, nie wybielać, nie czyścić chemicznie, suszyć w stanie rozłożonym, z dala od źródeł ciepła.

#### **Przechowywanie:**

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

Wysokość A - G

do 70 cm - krótkie

od 71 cm - długie

**Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy.**

#### **TABELA ROZMIARÓW:**

Oznaczenie miejsca pomiaru	Pomiar ( cm )	S	M	L	XL
g	Obwód górnej części uda	43 - 58	52 - 70	52 - 74	64 - 80
f	Obwód na środku uda	40 - 52	46 - 61	49 - 62	56 - 69
d	Obwód pod	27 - 34	32 - 40	36 - 43	40 - 49

---

	kolanem				
c	Obwód łydki w największym obwodzie	29 - 35	34 - 41	37 - 45	42 - 48
b	Obwód kostki mierzony w punkcie naj mniejszego obwodu	19 - 21	22 - 24	25 - 27	28 - 31