

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/rajstopy-medyczne-uciskowe-ccl-1-delicate-p-10839.html>



Rajstopy medyczne uciskowe CCL 1 DELICATE

Cena	100,00 zł
Numer katalogowy	PT0431
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

PT 0431 Rajstopy medyczne uciskowe CCL 1 DELICATE (15 - 21 mmHg)

Wskazania / Zastosowanie:

- żylakowatość (żylaki pierwotne i wtórne, żylaki w okresie ciąży, wspomagająco w leczeniu stwardnień żył, po zabiegach chirurgicznych przeprowadzanych na żyłach)
- zatorowość-zakrzepica (zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych, a także stan po zagojonym zapaleniu żył, głęboka zakrzepica żylna w nodze, stan po zakrzepicy, syndrom pozakrzepowy, profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów chodzących)
- przewlekła niewydolność żył (zapobieganie i leczenie wrzodów, niewydolność żył, angiodyspłazja)
- obrzęki (limfatyczne, w okresie ciąży, pourazowe, pooperacyjne, cykliczne obrzęki samoistne, stany zastoju na skutek unieruchomienia / syndrom zastoju stawowego, niedowład i częściowy niedowład kończyn)

Bezwzględne przeciwwskazania:

- zaawansowana niedrożność żył obwodowych; niewyrównana niewydolność serca; septyczne zapalenie żył; bolesny siniczny obrzęk kończyny

Względne przeciwwskazania:

- wyraźna dermataza sącząca; duże zaburzenia wrażliwości kończyn; zaawansowana neuropatia obwodowa (np. cukrzyca); pierwotne, chroniczne zapalenie stawów; nietolerancja na materiał, z którego wykonane są produkty

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiarów obwodów obu nóg, w pozycji stojącej, w miejscach wskazanych w tabeli, a następnie wybrać rozmiar.

Tabela rozmiarów

Objaśnienia do tabeli rozmiarów:

AT rajstopy

AG pończochy

AD podkolanówki

K środkowy punkt krocza

cH obwód bioder

cG obwód mierzony 5 cm poniżej K

cF obwód mierzony w połowie uda

cD obwód mierzony poniżej guzowatości kości piszczelowej

cC obwód mierzony w łydce – w miejscu największego obwodu

cB obwód mierzony w kostce – w miejscu najmniejszego obwodu

Aby dobrać prawidłową długość należy zmierzyć wskazany poniżej odcinek nóg:

dla rajstop i pończoch AG 60 – 70 cm krótkie / AG 71 – 83 cm długie

dla podkolanówek AD 34 – 37 cm krótkie / AD 38 – 44 cm długie

Sposób zakładania:

Medyczne produkty kompresyjne zakłada się inaczej niż zwykłe wyroby pończosnicze. Produkty kompresyjne należy zakładać rano, po nocnym odpoczynku, najlepiej przed wstaniem, w pozycji leżącej lub zaraz po wstaniu.

Należy stosować się do poniższej instrukcji:

- Nie należy ciągnąć wyrobu do góry, ale zebrać ostrożnie wyrób w dłoniach na całej długości. W przypadku pończoch nie należy chwycić bezpośrednio za szew taśmy samonośnej z silikonem.
- Nakładać od palców do kostki, rozprowadzić równomiernie na stopie.
- Zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty.
- Nakładać do kolana, dokładnie rozprowadzając na łydce, zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania, wygładzić wewnętrzną stroną dłoni.
- Wyrób nałożyć do pełnej długości.
- W przypadku rajstop nałożyć tak, jak opisano powyżej – najpierw na jedną nogę do kolana, potem na drugą nogę, a następnie do pełnej długości rajstop.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

Wskazówki dotyczące pielęgnacji:

- Produkt kompresyjny prać codziennie, po noszeniu.
- Prać najlepiej oddzielnie lub przynajmniej z tkaninami o podobnych kolorach.
- Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Uwagi:

- Dobór klasy kompresji, dopasowanie rozmiaru i stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- Nie stosować wyrobu na rany, chorobowo zmienioną lub uszkodzoną skórę.

-
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.
 - W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem.
 - Przy zakładaniu i zdejmowaniu wyrobu zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić delikatnego produktu np. paznokciem, zegarkiem lub biżuterią. Zaleca się stosowanie gumowych rękawiczek. Również paznokcie u nóg, chropowata lub zrogowaciała skóra np. na piętach, uszkodzone wnętrze obuwia lub wkładki do butów zwiększające tarcie, mogą doprowadzić do powstania przetarć i uszkodzenia wyrobu.
 - Stosowanie maści, olejków, kremów i podobnych substancji może mieć negatywny wpływ na właściwości wyrobu, obniżyć jego trwałość i zmniejszyć skuteczność działania.
 - Medyczna skuteczność produktów kompresyjnych gwarantowana jest przy prawidłowej pielęgnacji przez okres 6 miesięcy. Po tym okresie noszenia zmniejsza się lecznicza skuteczność wyrobów pończoszniczych na skutek zmęczenia i zużycia materiału.

Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: długie , krótkie

Kolor: beżowy , czarny , czarny - NERO , jasny beż , ciemny beż

Rozmiar: L PLUS , M Plus , S PLUS , S , M , L

TYP: z czubkiem otwartym , z czubkiem zamkniętym