

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/rajstopy-medyczne-uciskowe-pani-teresa-ccl2-premium-p-10842.html>



## Rajstopy medyczne uciskowe PANI TERESA CCL2 Premium

Cena	<b>210,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PT0461</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### Rajstopy medyczne uciskowe PANI TERESA CCL2 Premium 23 - 32 mmHg

#### Instrukcja używania:

##### STOSOWANIE

Dobór klasy kompresji, rozmiar i stosowanie wyrobu należy skonsultować z lekarzem.

Produkt kompresyjny powinno się zakładać rano, o ile to możliwe po przebudzeniu i nosić przez cały dzień.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub dolegliwości bólowych podczas noszenia produktów kompresyjnych należy skonsultować się z lekarzem.

Medyczna skuteczność produktów kompresyjnych gwarantowana jest przy prawidłowej pielęgnacji przez okres 6 miesięcy. Po tym okresie noszenia zmniejsza się lecznicza skuteczność pończoch na skutek zmęczenia i zużycia materiału.

##### WSKAZANIA

- Żylakowatość (żylaki pierwotne i wtórne, żylaki w okresie ciąży, wspomagająco w leczeniu stwardnień żył, po zabiegach chirurgicznych przeprowadzanych na żyłach)
- Zatorowość-zakrzepica (zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych, a także stan po zagojonym zapaleniu żył, głęboka zakrzepica żylna w nodze, stan po zakrzepicy, zespół pozakrzepowy, profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów chodzących)
- Przewlekła niewydolność żył (zapobieganie i leczenie wrzodów, niewydolność żył, angiodyspłazja)
- Obrzęki (limfatyczne, w okresie ciąży, pourazowe, pooperacyjne, cykliczne obrzęki samoistne, stany zastójne na skutek unieruchomienia /zespół zastójny stawowy, niedowład i częściowy niedowład kończyn)

##### BEZWZGLĘDNE PRZECIWSKAZANIA

Zaawansowana niedrożność żył obwodowych, niewyrównana niewydolność serca, septyczne zapalenie żył, bolesny siniczny obrzęk kończyny

---

## **WZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA**

Wyraźna dermatoza sącząca, duże zaburzenia wrażliwości kończyn, zaawansowana neuropatia obwodowa, cukrzyca, pierwotne, chroniczne zapalenie stawów, nietolerancja na materiał, z którego wykonane są produkty.

## **INSTRUKCJA ZAKŁADANIA**

Medyczne pończochy kompresyjne zakłada się inaczej niż zwykłe wyroby pończosznicze. Produkty kompresyjne należy zakładać rano, po nocnym odpoczynku, najlepiej przed wstaniem, w pozycji leżącej lub zaraz po wstaniu. Przy zakładaniu i zdejmowaniu można stosować gumowe rękawice, uważać, by nie uszkodzić produktu paznokciami, zegarkiem, biżuterią. Nie zakładać na otwarte rany. Nie należy ciągnąć wyrobu do góry, ale zebrać ostrożnie wyrób w dłoniach na całej długości. (W przypadku pończoch nie należy łąpać bezpośrednio za szew taśmy podtrzymującej.) Nakładać od palców do kostki, rozprowadzić równomiernie na stopie. Zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Nakładać do kolana, dokładnie rozprowadzając na łydce, zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania, wygładzić wewnętrzną stronę dłoni. Wyrób nałożyć do pełnej długości. W przypadku rajstop nałożyć jak opisano powyżej najpierw na jedną nogę do kolana, potem na drugą nogę, a następnie do pełnej długości rajstop.

Nieprawidłowa pielęgnacja pięt oraz noszenie niewłaściwego obuwia (np. wkładki w obuwiu zwiększające tarcie) mogą przyczynić się do powstawania przetarć i uszkodzenia produktu.

Wskazany jest brak kontaktu produktu z tłustymi maściami, kremami, olejkami i podobnymi substancjami.

## **WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI**

Produkt kompresyjny prać codziennie, po noszeniu. Prać ręcznie lub w pralce, z użyciem środka do tkanin delikatnych, w temperaturze 40°C (program do tkanin delikatnych). Nie stosować wybielaczy oraz płynów zmiękczających. Prać najlepiej oddzielnie lub przynajmniej z tkaninami o podobnych kolorach.

Produkt kompresyjny suszyć rozwieszając na suszarce, chroniąc przed bezpośrednim nasłonecznieniem lub w suszarce bębnowej włączając program ochronny. Nie czyścić chemicznie, nie stosować odplamiaczy. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym pomieszczeniu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

## **OBJAŚNIENIA DO TABELI ROZMIARÓW**

AT - rajstopy

AG - pończochy

AD - podkolanówki

K - środkowy punkt krocza

cG - obwód mierzony 5 cm poniżej K

cF - obwód mierzony w połowie odległości między K i E

cE - obwód mierzony przez środek rzepki i nad tylną częścią kolana

cD - obwód mierzony poniżej guzowatości kości piszczelowej

cC - obwód mierzony w łydce w największym obwodzie

cB1 - obwód mierzony w miejscu, w którym ścięgno Achillesa przechodzi w mięsień łydki

cB - obwód mierzony w kostce w miejscu najmniejszego obwodu

---

## **TABELA ROZMIARÓW**

### **Pomiar długości nogi dla rajstop i pończoch to:**

AG 72-83 normal

AG 62-71 short

### **Pomiar długości nogi dla podkolanówek to:**

AD 39-44 normal

AD 34-38 short

**Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy.**

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Długość:** normal , short

**Kolor:** Ciemny beż - GLACE , czarny - NERO , Grafit - GRAPHITE , Granat - BLUE NAVY , Jasny beż - VISONE

**Rozmiar:** I , II , III , IV , V , VI

**TYP:** z czubkiem otwartym , z czubkiem zamkniętym