

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/slipy-przepuklinowo-suspensoryjne-meskie-pt0111-p-6534.html>



## Slipy przepuklinowo - suspensoryjne męskie PT0111

Cena	<b>150,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PT0111</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- po operacjach rozległych przepuklin pachwinowych lub udowych
- w przebiegu ostrego zapalenia jąder lub najądrza
- w przypadku obrzęków jąder lub najądrza
- po operacjach lub po nakłuciu wodniaka jądra
- łagodzi bóle brzucha promieniujące do pachwiny
- zapobiega uwypuklaniu się przepuklin podczas wykonywania wysiłku fizycznego
- bardzo wskazane dla pacjentów, u których istnieją przeciwwskazania do leczenia operacyjnego
- w celu zapobiegania przepuklinom w przypadku bardzo szerokich kanałów pachwinowych

#### PRZECIWWSKAZANIA:

- nie stosować w przypadku przepukliny nieodprowadzalnej, ponieważ płytka/pelota może stwarzać niebezpieczeństwo uszkodzenia ściany jelita

#### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa [cm]		70 - 80	81 - 90	91 - 100	101 - 115	116 - 130
Obwód bioder [cm]		85 - 95	96 - 105	106 - 115	116 - 125	126 - 135

#### Instrukcja używania:

##### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu pasa i bioder, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

---

**Sposób zakładania:**

Slipy założyć tak, aby płytki/peloty zabezpieczyły przepuklinę.

**Przechowywanie:**

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

**Przepis prania:**

- Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!
- Przed praniem wyjąć płytki/peloty. Po praniu ponownie umieścić je w tych samych miejscach.

**Uwagi:**

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** XS , S , M , L , XL , XXL