

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/slipy-przepuklinowo-suspensoryjne-meskie-pt0111-p-6534.html>



Slipy przepuklinowo - suspensoryjne męskie PT0111

Cena	150,00 zł
Numer katalogowy	PT0111
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- po operacjach rozległych przepuklin pachwinowych lub udowych
- w przebiegu ostrego zapalenia jąder lub najądrza
- w przypadku obrzęków jąder lub najądrza
- po operacjach lub po nakłuciu wodniaka jądra
- łagodzi bóle brzucha promieniujące do pachwiny
- zapobiega uwypuklaniu się przepuklin podczas wykonywania wysiłku fizycznego
- bardzo wskazane dla pacjentów, u których istnieją przeciwwskazania do leczenia operacyjnego
- w celu zapobiegania przepuklinom w przypadku bardzo szerokich kanałów pachwinowych

PRZECIWWSKAZANIA:

- nie stosować w przypadku przepukliny nieodprowadzalnej, ponieważ płytka/pelota może stwarzać niebezpieczeństwo uszkodzenia ściany jelita

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa [cm]		70 - 80	81 - 90	91 - 100	101 - 115	116 - 130
Obwód bioder [cm]		85 - 95	96 - 105	106 - 115	116 - 125	126 - 135

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu pasa i bioder, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

Slipy założyć tak, aby płytki/peloty zabezpieczały przepuklinę.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

- Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!
- Przed praniem wyjąć płytki/peloty. Po praniu ponownie umieścić je w tych samych miejscach.

Uwagi:

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: XS , S , M , L , XL , XXL