

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/stabilizator-stawu-skokowego-ortopedyczny-pt0324-p-6557.html>



Stabilizator stawu skokowego - ortopedyczny PT0324

Cena	120,00 zł
Numer katalogowy	PT0324
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- łagodzi bóle, nie ogranicza ruchów, zmniejsza obrzęk
- zabezpiecza przed urazami stawu, zmniejsza ryzyko powstania ponownej kontuzji, przyspiesza jej leczenie
- usztywnia staw skokowy po skręceniu stopy w przypadkach konieczności bocznej stabilizacji w stawie skokowo-goleniowym

Istnieje możliwość regulacji w obrębie zapięcia na rzep, zmieniając siłę nacisku.

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
Obwód nogi nad kostką [cm]	19 - 22	23 - 25	26 - 28	29 - 31	32 - 34

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu miejsca wskazanego w tabeli, a następnie wybrać rozmiar.

Sposób zakładania:

Stabilizator zakłada się na staw skokowy, umieszczając piętę w otworze i zapinając na rzepy tak, aby dokładnie dopasować wzmocnienia boczne okołokostkowe. Następnie należy zapiąć taśmę wzmacniającą, krzyżując ją na przegubie stopy.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Przed praniem zapiąć rzepy w celu uniknięcia pohaczenia.

Uwagi:

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- O czasie stosowania wyrobu decyduje lekarz.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem. Ciągłe stosowanie wyrobu, bez wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie, może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować wyrobu na uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.
- Nie stosować wyrobu jeżeli wcześniej użyto np. maści, żeli, kremów rozgrzewających.
- Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S , M , L , XL , XXL

TYP: lewy , prawy