

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/stabilizator-stawu-skokowego-z-tasma-pt0320-p-6553.html>



## Stabilizator stawu skokowego z taśmą PT0320

Cena	<b>120,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PT0320</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- zabezpiecza staw przed powtórными kontuzjami
- zmniejsza ryzyko powstania kontuzji stawu podczas uprawiania sportu lub w czasie wzmożonego wysiłku
- wzmacnia i chroni
- przyspiesza leczenie kontuzji
- łagodzi bóle i zmniejsza obrzęk
- nie ogranicza ruchów

Możliwość regulacji w obrębie zapięcia na rzep pozwala na zmianę siły docisku.

Usztywnienie stawu skokowego po skręceniu stopy w przypadkach konieczności bocznej stabilizacji w stawie skokowo-goleniowym.

#### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
Obwód nogi nad kostką [cm]	19 - 22	23 - 25	26 - 28	29 - 31	32 - 34

#### Instrukcja używania:

##### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu miejsca wskazanego w tabeli, a następnie wybrać rozmiar.

##### Sposób zakładania:

---

Stabilizator zakłada się na staw skokowy, umieszczając piętę w otworze. Zapiąć rzepy. Następnie należy zapiąć taśmę wzmacniającą, krzyżując ją na przegubie stopy.

#### **Przechowywanie:**

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

#### **Przepis prania:**

Przed praniem zapiąć rzepy w celu uniknięcia pohaczenia.

#### **Uwagi:**

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- O czasie stosowania wyrobu decyduje lekarz.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem. Ciągłe stosowanie wyrobu, bez wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie, może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować wyrobu na uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.
- Nie stosować wyrobu jeżeli wcześniej użyto np. maści, żeli, kremów rozgrzewających.
- Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

#### **Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Rozmiar:** S , M , L , XL , XXL