

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/sztywny-kolnierz-ortopedyczny-profit-eb-ks-p-6203.html>

## Sztywny kołnierz ortopedyczny profit EB-KS



Cena	<b>185,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>EB-KS</b>
Producent	<b>Reh4Mat</b>

### Opis produktu

#### Charakterystyka wyrobu

Kołnierz szyjny ortopedyczny sztywny typu Florida, wykonany z odpowiednio dobranej płyty polietylenowej wykończonej pianką poliuretanową oraz dzianiny Profit. Jest to dwuwarstwowa dzianina, która doskonale dopasowuje się do ciała pacjenta, rozciąga się we wszystkich kierunkach doskonale modelując kształt kończyny – tworzy tzw. drugą skórę. Zewnętrzna warstwa ze spandeksu odpowiada za właściwą kompresję i dopasowanie wyrobu, redukuje drganie mięśni powstające w trakcie wysiłku fizycznego. Wewnętrzna membrana z mikrofibry, bawełny i elastanu odpowiada za utrzymanie właściwego klimatu przy skórze oraz odprowadzanie potu, jej struktura gwarantuje aksamitną miękkość w dotyku.

#### Właściwości

Stabilizuje i odciąża kręgosłup w odcinku szyjnym, odciąża mięśnie szyi, Wskazania, okres stosowania zależne od decyzji lekarza prowadzącego.

#### Przeznaczenie

- w ostrych i przewlekłych zespołach bólowych szyi i barków spowodowanych urazem, przeciążeniem lub zmianami zwyrodnieniowymi
- w zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego połączonych z objawami neurologicznymi (radikulopatia szyjna, parestezje kończyn górnych, zawroty głowy i zaburzenia równowagi)
- w bólach głowy i szumach usznych pochodzenia szyjnego
- w kręzcu szyi spowodowanym różnymi przyczynami

#### Przeciwwskazania

- uczucie duszności i dyskomfort, nasilenie istniejących dolegliwości może znacznie ograniczyć lub nawet uniemożliwić stosowanie ortozy (szczególnie u osób z przerostem tarczycy, przy znacznej otyłości, przy nasilonych zaburzeniach nerwicowych) – po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym
- należy szczególnie kontrolować prawidłowość stosowanie ortozy zgodnie z zaleceniami u dzieci, osób z zaburzeniami pamięci, chorych psychicznie
- w przypadku zmian na skórze w miejscach przylegania (otarcia naskórka, zranienia, egzemy skórne) stosowanie ortozy jest ograniczone – możliwe po założeniu opatrunku

Rozmiar  
SObwód szyi  
31-36 cmDostępne w wysokości  
8,10,12 cm

Sposób dokonywania pomiaru

---

Rozmiar	Obwód szyi	Dostępne w wysokości	Sposób dokonywania pomiaru
M	37-42 cm		
L	43-48 cm		

Wszystkie rozmiary występują w trzech wysokościach 8, 10, 12 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wysokość:** 8 , 10 , 12

**Rozmiar:** S , M , L