

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/temblak-konczyny-gornej-typu-podwieszka-rozmiar-uniwiersalny-pt0210-p-6561.html>



Temblak kończyny górnej typu "PODWIESZKA" - rozmiar uniwersalny PT0210

Cena	60,00 zł
Numer katalogowy	PT0210
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- w niedowładach kończyny górnej np. po udarze mózgu
- jako opatrunek podtrzymujący opatrunek gipsowy
- po zdjęciu opatrunku gipsowego – podczas rehabilitacji
- jako opatrunek doraźny w przypadku złamania kości przedramienia lub zwichnięcia stawu łokciowego

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

Podwieszka jest produkowana w jednym standardowym rozmiarze z możliwością indywidualnego dopasowania.

Sposób zakładania:

Są dwa sposoby zakładania wyrobu:

1. Podwieszkę przełożyć przez szyję, przedramię umieścić w „oczku” podwieszki. Odpowiednią długość podwieszki wyregulować indywidualnie za pomocą rzepów.
2. Przedramię umieścić w „oczku” podwieszki, pasek podwieszki przełożyć do tyłu, przez plecy, szyję i drugie ramię, a następnie z przodu umieścić przedramię w drugim oczku podwieszki. Odpowiednią długość podwieszki wyregulować indywidualnie za pomocą rzepów.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: granatowy , popielaty , bordowy