

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/temblak-z-tasma-stabilizujaca-wokol-tulowia-pt0211-p-6562.html>



Temblak z taśmą stabilizującą wokół tułowia PT0211

Cena	65,00 zł
Numer katalogowy	PT0211
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- jako opatrunek podtrzymujący opatrunek gipsowy
- po zdjęciu opatrunku gipsowego – podczas rehabilitacji
- jako opatrunek doraźny w przypadku złamania kości przedramienia lub zwichnięcia stawu łokciowego

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL
Obwód klatki piersiowej [cm]		60 - 75	76 - 91	92 - 107	> 107

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu klatki piersiowej, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

Przedramię umieścić w kieszeni temblaka, kciuk zawiesić w przeznaczonym do tego „oczku” w wewnętrznej części temblaka. Taśmę przełożyć przez zdrowe ramię dopasowując odpowiednio jej długość za pomocą rzepów, a wzmocnienie ochronne na taśmie układając na szyi. Drugą taśmę – stabilizującą zapiać wokół tułowia regulując jej długość zapięciem na rzep.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- W celu zapobiegnięcia przykurczowi ramienia, do temblaka PT 0211 można dokupić klin odwodzący przedramię PT 0205.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: XS , S , M , L , XL