

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/temblak-z-tasma-stabilizujaca-wokol-tulowia-pt0211-p-6562.html>



## Temblak z taśmą stabilizującą wokół tułowia PT0211

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>65,00 zł</b>    |
| Numer katalogowy | <b>PT0211</b>      |
| Producent        | <b>Pani Teresa</b> |

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- jako opatrunek podtrzymujący opatrunek gipsowy
- po zdjęciu opatrunku gipsowego – podczas rehabilitacji
- jako opatrunek doraźny w przypadku złamania kości przedramienia lub zwichnięcia stawu łokciowego

#### Tabela rozmiarów

| ROZMIAR                      | XS | S       | M       | L        | XL    |
|------------------------------|----|---------|---------|----------|-------|
| Obwód klatki piersiowej [cm] |    | 60 - 75 | 76 - 91 | 92 - 107 | > 107 |

#### Instrukcja używania:

##### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu klatki piersiowej, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

##### Sposób zakładania:

Przedramię umieścić w kieszeni temblaka, kciuk zawiesić w przeznaczonym do tego „oczku” w wewnętrznej części temblaka. Taśmę przełożyć przez zdrowe ramię dopasowując odpowiednio jej długość za pomocą rzepów, a wzmocnienie ochronne na taśmie układając na szyi. Drugą taśmę – stabilizującą zapiać wokół tułowia regulując jej długość zapięciem na rzep.

##### Przechowywanie:

---

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

**Przepis prania:**

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

**Uwagi:**

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- W celu zapobiegnięcia przykurczowi ramienia, do temblaka PT 0211 można dokupić klin odwodzący przedramię PT 0205.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** XS , S , M , L , XL