

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/tena-men-pants-plus-l-95-130-cm-bielizna-chlonna-30-sztuk-p-9433.html>



## TENA Men Pants Plus L (95-130 cm), bielizna chłonna, 30 sztuk

Numer katalogowy **772612**

Producent **Tena**

### Opis produktu

TENA Men Pants L to pierwsza w Polsce bielizna chłonna zaprojektowana dla męzczyzn. Bielizna chłonna zalecana jest do codziennego stosowania w średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu (poziom chłonnaści 5,5/8). TENA Men Pants L przeznaczone są dla osób chodzących, poruszających się choćby po domu, o rozmiarze 95-130 cm w pasie. Bielizna chłonna TENA Men Pants zapewnia unikalną ochronę dzięki wkładowi chłonnemu dopasowanemu do kształtu męskiego ciała, pełną dyskrecję dzięki męskiemu kolorowi i kontroli nieprzyjemnego zapachu oraz wysoki komfort dzięki bardzo miękkiemu i w pełni oddychającemu materiałowi. TENA Men Pants są zakładane jak zwykła bielizna, zapewniają wysoki komfort i dyskrecję. Bielizna chłonna TENA dobrze przylega do ciała, dzięki czemu nie odznaczają się pod ubraniem. Bielizna chłonna i majtki chłonne TENA dostępne są w różnych rozmiarach i poziomach chłonnaści, również w refundacji.

#### Dodatkowe informacje:

TENA Pants to majtki chłonne, które, w przypadku wycieku moczu, chłoną mocz do wnętrza wkładu chłonnego oraz utrzymują go w jego wnętrzu dzięki specjalnemu superabsorbentowi. Jednocześnie zabezpieczają przed wydostaniem się nieprzyjemnego zapachu na zewnątrz. Specjalny projekt SmartDesign sprawia, że majtki chłonne TENA Pants Normal nie odznaczają się pod ubraniem, zapewniając pełen komfort i dyskrecję w trakcie chodzenia.

- Błyskawiczna suchość dzięki systemowi FeelDry
- ochrona przed nieprzyjemnym zapachem dzięki systemowi Odour Neutralizer
- zakładane jak zwykła bielizna
- specjalny projekt SmartDesign dla dyskrecji i komfortu
- oddychający materiał dla ochrony skóry

#### Wskazania:

- Dla osób chodzących, poruszających się choćby po domu, ze średnim lub ciężkim nietrzymaniem moczu (poziom chłonnaści 5,5/8), o rozmiarze 95-130 cm w pasie.

#### Instrukcja korzystania:

1. Włóż majtki chłonne TENA Pants jak zwykłą bieliznę. Po wykorzystaniu:
2. Aby zdjąć, po użyciu rozerwij majtki chłonne wzdłuż szwów bocznych.
3. Po zdjęciu zroluj majtki chłonne i zaklej rzepem.
4. Wyrzuć zrolowane majtki chłonne do kosza na śmieci

#### Dodatkowe poziomy chłonnaści i rozmiary:

Bielizna chłonna TENA Men Pants dostępna jest również w rozmiarze M oraz w wariantach majtek chłonnnych:

- 
- TENA Pants Normal,
  - TENA Pants Plus
  - TENA Pants Super

**\*Produkt jest refundowany**