

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/universalna-orteza-haluksa-am-op-03-p-6000.html>

## Uniwersalna orteza haluksa AM-OP-03



Cena	<b>130,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AM-OP-03</b>
Producent	<b>Reh4Mat</b>
Rozmiar	<b>161.002, 3, 4, 5, 6</b>
kształt	<b>Zielony (161.003)</b>

### Opis produktu

#### Paluch koślawy (hallux valgus)

**Paluch koślawy** to deformacja dużego palca, a ściślej stawu **śródstopno-paliczkowego palucha (MTP)**. Uszkodzenie polega na szpotawym ustawieniu I kości śródstopia oraz koślawym palucha. Deformacja może rozpoczynać się w obrębie palucha lub kości śródstopia w przypadku stopy poprzecznie płaskiej.

Paluch koślawy najczęściej obserwowany jest u kobiet i może występować rodzinnie.

Aby zapobiec schorzeniu największe znaczenie ma profilaktyka. Staraj się unikać długotrwałego stania i noszenia obuwia z wąskim przodem. Jeśli wiesz, że jesteś obciążony genetycznie paluchem koślawym, powinieneś stosować naszą **ortezę na haluksa AM-OP-03**.

#### Charakterystyka produktu

**Orteza haluksa AM-OP-03**, przeznaczona jest do stosowania jako zaopatrzenie domowe nocne. Koryguje ona koślawe ustawienie palucha oraz zapobiega powstawaniu deformacji w obrębie śródstopia.

**Orteza została wykonana z niezwykle przyjaznego dla skóry surowca UniPren.**

Jest to uniwersalny trójwarstwowy surowiec składający się z zewnętrznej elastycznej poliamidowej dzianiny okładkowej o funkcji samoszczepnej, wewnętrznego rdzenia z pianki neoprenowej oraz elastycznej jerseyowej dzianiny okładkowej. Materiał ten charakteryzuje się miękkością i bardzo wysoką elastycznością. Bardzo ważnym atutem tego surowca jest to, że nie jest to wyrób dziany, nie posiada grubych włókien, przez co jego sploty nie odciskają się na skórze pacjenta i nie powodują ran w miejscach o dużej kompresji!

**Szyna haluksa AM-OP-03** została wyposażona w wyprofilowaną aluminiową szynę boczną, która ma za zadanie ustawić paluch w osi stawu. Szeroka opaska na śródstopie zbliża kości śródstopia i wspomaga działanie korekcyjne.

**AM-OP-03** jest ortezą przeznaczoną do aktywnej korekty lekkiego i umiarkowanego palucha koślawego. Przywraca naturalne ustawienie stopy, chroniąc i redukując ból w obrębie palucha. Ortezę powinno się stosować zarówno profilaktycznie, jak i w stanach pooperacyjnych. Dzięki niej okres rehabilitacji jest krótszy i mniej uciążliwy. Można ją stosować zarówno w domu jak i

---

podczas snu.

Materiał, z którego wykonano produkt, jest elastyczny i samoszczepny, dzięki czemu szyna ma **tylko 1 rozmiar**.

### **Przeznaczenie**

- Paluch sztywny (hallux rigidus)
- zmiany zwyrodnieniowe w stawie śródstopno-paliczkowym palucha
- łagodne i umiarkowane zapalenia kaletki stawowej
- w pooperacyjnej rehabilitacji

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**TYP:** lewy , prawy