

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/universalna-orteza-haluksa-am-op-03-p-6000.html>

Uniwersalna orteza haluksa AM-OP-03



Cena	130,00 zł
Numer katalogowy	AM-OP-03
Producent	Reh4Mat
kształt	Zielony (161.003)
Rozmiar	161.002, 3, 4, 5, 6

Opis produktu

Paluch koślawy (hallux valgus)

Paluch koślawy to deformacja dużego palca, a ściślej stawu **śródstopno-paliczkowego palucha (MTP)**. Uszkodzenie polega na szpotawym ustawieniu I kości śródstopia oraz koślawym palucha. Deformacja może rozpoczynać się w obrębie palucha lub kości śródstopia w przypadku stopy poprzecznie płaskiej.

Paluch koślawy najczęściej obserwowany jest u kobiet i może występować rodzinnie.

Aby zapobiec schorzeniu największe znaczenie ma profilaktyka. Staraj się unikać długotrwałego stania i noszenia obuwia z wąskim przodem. Jeśli wiesz, że jesteś obciążony genetycznie paluchem koślawym, powinieneś stosować naszą **ortezę na haluksa AM-OP-03**.

Charakterystyka produktu

Orteza haluksa AM-OP-03, przeznaczona jest do stosowania jako zaopatrzenie domowe nocne. Koryguje ona koślawe ustawienie palucha oraz zapobiega powstawaniu deformacji w obrębie śródstopia.

Orteza została wykonana z niezwykle przyjaznego dla skóry surowca UniPren.

Jest to uniwersalny trójwarstwowy surowiec składający się z zewnętrznej elastycznej poliamidowej dzianiny okładkowej o funkcji samoszczepnej, wewnętrznego rdzenia z pianki neoprenowej oraz elastycznej jerseyowej dzianiny okładkowej. Materiał ten charakteryzuje się miękkością i bardzo wysoką elastycznością. Bardzo ważnym atutem tego surowca jest to, że nie jest to wyrób dziany, nie posiada grubych włókien, przez co jego sploty nie odciskają się na skórze pacjenta i nie powodują ran w miejscach o dużej kompresji!

Szyna haluksa AM-OP-03 została wyposażona w wyprofilowaną aluminiową szynę boczną, która ma za zadanie ustawić paluch w osi stawu. Szeroka opaska na śródstopie zbliża kości śródstopia i wspomaga działanie korekcyjne.

AM-OP-03 jest ortezą przeznaczoną do aktywnej korekty lekkiego i umiarkowanego palucha koślawego. Przywraca naturalne ustawienie stopy, chroniąc i redukując ból w obrębie palucha. Ortezę powinno się stosować zarówno profilaktycznie, jak i w stanach pooperacyjnych. Dzięki niej okres rehabilitacji jest krótszy i mniej uciążliwy. Można ją stosować zarówno w domu jak i

podczas snu.

Materiał, z którego wykonano produkt, jest elastyczny i samoszczepny, dzięki czemu szyna ma **tylko 1 rozmiar**.

Przeznaczenie

- Paluch sztywny (hallux rigidus)
- zmiany zwyrodnieniowe w stawie śródstopno-paliczkowym palucha
- łagodne i umiarkowane zapalenia kaletki stawowej
- w pooperacyjnej rehabilitacji

Produkt posiada dodatkowe opcje:

TYP: lewy , prawy