

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/uniwersalny-pas-brzusznym-30-pt-0101-p-5817.html>



## Uniwersalny pas brzuszny „30” PT 0101

Cena	<b>80,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PT 0101</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- po operacjach jamy brzusznej - pas ułatwia poruszanie się
- zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny pooperacyjnej
- ogranicza powiększanie się istniejących przepuklin brzusznych, np. pępkowych, pooperacyjnych
- pas wspomaga leczenie w przypadku rwy kulszowej
- w przebiegu chorób zwyrodnieniowo - zapalnych stawów pas ma działanie ochraniające i łagodzi bóle
- pas wzmacnia mięśnie brzucha i zapobiega opuszczeniu trzewi jamy brzusznej
- ma działanie ocieplające

#### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód brzucha [cm]		80 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121 - 140	> 140

### Instrukcja używania:

#### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu brzucha, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

#### Sposób zakładania:

Odpiąć rzep. Pas ułożyć obejmując brzuch i odcinek lędźwiowo - krzyżowy, tak by zapięcie na rzep przypadało z przodu. Pas zapiąć regulując indywidualnie w obrębie zapięcia.

Uwaga! Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.

---

**Przechowywanie:**

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

**Przepis prania:**

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!

**Uwagi:**

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

W czasie noszenia pasa zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie pasa bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni brzucha.

**Pas zapinany jest na rzep.**

Szerokość pasa 30 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** XS , S , M , L , XL