

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/uprzaz-typu-lejce-neo-2005-p-5066.html>

Uprząż typu 'Lejce' Neo 20.05



Cena	250,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	Neo 20.05
Producent	Vermeiren

Opis produktu

Prawidłowa postawa ciała to taka, która zapewnia optymalną stabilność, wymaga minimalnego wysiłku mięśniowego do jej utrzymania w pionie oraz stwarza warunki do optymalnego ułożenia narządów wewnętrznych. Prawidłowa postawa charakteryzuje się:

- Prostym ustawieniem głowy,
- fizjologicznymi wygięciami kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i prostym kręgosłupem w płaszczyźnie czołowej,
- dobrze wysklepioną klatką piersiową,
- ramiona delikatnie cofnięte w stosunku do miednicy,
- symetryczne ułożenie miednicy.

Najbardziej obciąża kręgosłup siedzenie. Dlatego bardzo ważne jest aby osoba siedząca w wózku miała zagwarantowane prawidłowe podparcie.

Występują trzy podstawowe powierzchnie podparcia : pośladki plecy oraz kończyny dolne.

Pasy U78Neo stosuje się do korekty i stabilizacji tułowia w typowych deformacjach kręgosłupa;

KIFOZA

Cel zastosowania pasów:

- Powiększenie tułowia i wycofanie łopatek,
- zmniejszenie kifozy,
- naturalne ustawienie tułowia względem miednicy,
- poprawa zdolności oddechowej,
- poprawa kontroli głowy ,
- utrzymanie dobrego pola widzenia.

SKOLIOZA

Cel zastosowania pasów:

-
- Prawidłowe wsparcie tułowia , które wraz z pasem biodrowym oraz dodatkowym podparciem bocznym umożliwi utrzymywanie wyprostowanej postawy tułowia i utrzymanie głowy w prawidłowej pozycji.

ROTACJA KRĘGÓW W PŁASZCZYŹNIE POPRZECZNEJ czyli SKRĘCENIE TUŁOWIA.

Cel zastosowania pasów:

- Przyciągnięcie wychylonego barku do oparcia w taki sposób aby ustawić tułów w płaszczyźnie strzałkowej.

Standardowo wszystkie pasy stabilizujące górną część ciała są dostarczane z regulacją napięcia przednią , która umożliwia osobie siedzącej w wózku samodzielne wyregulowanie napięcia. Możliwe jest dostarczanie pasów i kamizelek z regulacją tylną , kiedy nie jest wskazane aby pacjent miał dostęp do samodzielnego wyregulowania napięcia.

Zaleca się przy takich deformacjach jak opisane powyżej stosowanie równoległe dwupunktowego pasa biodrowego **Neo 30.01**

SPOSÓB DOBORU PASÓW ORAZ KAMIZELEK:

Należy zmierzyć szerokość ramion biorąc pod uwagę tendencję do zmiany wagi , wzrostu, oraz grubsze ubranie.

XS (24cm-28cm)

S (28cm-33cm)

M (33cm-41cm)

L (41cm-48cm)

XL (48cm-56cm)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: XS , S , M , L , XL