

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/wkladki-medic-line-carlo-mo308-p-13359.html>

Wkładki Medic Line CARLO MO308

Producent

Mazbit



Opis produktu

- wkładki dla osób z ostrogą piętową
- miękka poduszka amortyzująca tyłostopie zapobiega uciskowi bolącej ostrogi
- dla osób odczuwających ból pięty podczas chodzenia
- wyściółka z mikrofibry przyjazna skórze

Rodzaj	Wkładki dla dorosłych
Przeznaczenie	Płaskostopie podłużne, Płaskostopie poprzeczne, Ostroga kości piętowej
Obuwie	Sportowe, Trekkingowe, Półbuty
Wykonanie	Wyściółka, pelota, pianka z zawartością węgla aktywnego, sztywny profil
Rozmiar	35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

Pranie

Przecieranie chusteczką

Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar buta: 35/36 , 37/38 , 39/40 , 41/42 , 43/44 , 45/46