

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/wkladki-medic-line-lidia-15-mm-mo479-p-13364.html>

Wkładki Medic Line LIDIA 15 mm MO479

Producent

Mazbit



Opis produktu

- wkładki niwelująca asymetrię długości kończyn
- korkowy profil podpira piętę nogi krótszej
- zalecane do obuwia pełnego
- wyściółka z naturalnej skóry

Rodzaj
Przeznaczenie
Obuwie
Wykonanie

Rozmiar
Wysokość

Wkładki dla dorosłych
Nierówności kończyn dolnych
Sportowe, Trekkingowe, Półbuty, Wizytowe męskie
Naturalna skóra, sztywny korkowy profil, pianka lateksowa z zawartością węgla aktywnego
35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 35/40, 43/44, 45/46, 47/48
5 mm MO477
10 mm MO478
15 mm MO479

Pranie

Przecieranie chusteczką

Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar buta: 35/36 , 37/38 , 39/40 , 41/42 , 43/44 , 45/46 , 47/48