

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/wkladki-ortho-line-diabetic-tear-standard-ao36-p-13352.html>



## Wkładki Ortho Line DIABETIC TEAR (STANDARD) AO36

Producent

**Mazbit**

### Opis produktu

- wkładki przeznaczone dla diabetyków
- wspierają łuk podłużny i poprzeczny oraz aktywują pracę mięśni
- stabilizują piętę i ustawiają stopę w pozycji neutralnej, do stosowania w obuwiu codziennym, o średniej objętości
- zapobiegają powstawaniu modzeli, odciążają całą stopę, amortyzują wstrząsy
- wyściółka z antyalergicznego mikrofibry, przyjazna dla skóry

Rodzaj  
Przeznaczenie

Wkładki dla dorosłych  
Płaskostopie podłużne, Płaskostopie poprzeczne, Koślawość  
pięty, Pozostałe dolegliwości

Obuwie  
Rozmiar

Sportowe, Trekkingowe, Półbuty  
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

### Pranie

Mycie ręczne  
Pranie w temperaturze 30°C  
Przecieranie chusteczką

### Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźnia ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar buta:** 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48