

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/wysoka-sznurówka-pólsztywna-pt0225-p-6525.html>



## Wysoka sznurówka pólsztywna PT0225

Cena	<b>400,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PT0225</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- kręgoszyk
- wypukliny i wypadnięcia jądra miażdżystego - leczenie pooperacyjne lub zachowawcze
- procesy zapalne w obrębie stawów kręgosłupa
- neuropatyczne oraz pseudokorzeniowe zespoły bólowe
- choroby Scheuermanna
- zmiany osteoporotyczne
- ZZSK

#### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
Obwód brzucha [cm]	80 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121 - 140

### Instrukcja używania:

#### Dopasowanie rozmiaru:

- Zmierzyć obwód brzucha, a następnie dopasować rozmiar z tabeli umieszczonej na opakowaniu.
- Sznurówka złożona jest z dwóch niezależnych części: wysokiej sznurówki półsztywnej oraz części grzbietowej.

#### Sposób zakładania:

1. odpiąć rzepy
2. nałożyć sznurówkę wokół tułowia, zapiąć z przodu na rzep (rys. 1)
3. założyć część grzbietową dopinając do rzepów w odcinku lędźwiowym sznurówki (rys. 2)
4. taśmy dociągające sznurówki zapiąć z przodu na rzep regulując ucisk, a górne taśmy części grzbietowej przełożyć pod pachami (rys. 3), skrzyżować z tyłu (rys. 4) i zapiąć z przodu na rzep taśmy dociągające regulując ucisk (rys. 5)

---

5. upewnić się, że stabilizator dobrze przylega w każdej części i nie powoduje dyskomfortu

Pas zapiąć regulując indywidualnie w obrębie zapięcia na rzep.

**Uwaga! Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.**

Konstrukcja sznurówki umożliwia dokładne dopasowanie produktu do wzrostu pacjenta oraz selektywne stosowanie wyrobu w zależności od zaleceń lekarza.

**Przechowywanie:**

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

**Konserwacja:**

- Pranie. Przed praniem wyjąć z tylnej części stabilizatora wkładki. Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C, w delikatnych środkach piorących, bez wybielaczy i płynów zmiękczających, płukać wielokrotnie, nie chlorować, nie czyścić chemicznie.
- Suszyć w stanie rozłożonym, z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na działanie promieni słonecznych.
- Po wysuszeniu umieścić w tych samych miejscach wcześniej wyjęte elementy.

**Uwagi:**

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem, stosować według wskazań i pod nadzorem lekarza.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu konieczna jest konsultacja lekarska.
- Ciągłe stosowanie sznurówki bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni brzucha. O czasie stosowania sznurówki decyduje lekarz.
- W przypadku niewłaściwie dobranego rozmiaru może wystąpić czasowe upośledzenie pracy jelit i narządów wewnętrznych lub upośledzenie wydolności krążeniowo - oddechowej.
- Wyrób powinien być po raz pierwszy założony pacjentowi przez lekarza lub przeszkolony personel medyczny.
- Nie stosować wyrobu jeżeli wcześniej użyto maści rozgrzewającej.
- Wyrób można stosować na bawełnianą koszulkę.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

**Dostępne kolory:**

cielisty PT 0225

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Kolor:** czarny , Cielisty

**Rozmiar:** S , M , L , XL , XXL